



**AMP all**

ISO 13485

CE

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

1. Cung cấp nguồn điện cho thiết bị và lắp đặt thiết bị trên cọc truyền đúng vị trí.
2. Mở túi truyền dịch, kiểm tra chất lượng bao bì, hạn sử dụng và bom đẩy túi truyền dịch.
3. Lắp đặt túi truyền dịch vào bên trong thiết bị cho đúng vị trí và đúng phân đoạn.
4. Khởi động thiết bị, cài đặt các thông số truyền dịch theo nhu cầu và chỉ định của bác sĩ.
5. Bắt đầu truyền dịch theo phác đồ của bác sĩ.
6. Dừng truyền dịch và tắt máy.

**HỦY BỎ**

Sau khi sử dụng, thiết bị nên được xử lý theo các quy định hiện hành của bệnh viện và địa phương.

**ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN**

- Sản phẩm được đóng gói trong bao bì tiệt trùng.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ bảo quản từ 5°C - 40°C và tránh va đập.

**VẬN CHUYỂN**

Sản phẩm nên được vận chuyển bằng phương thức vận chuyển tiêu chuẩn đúng cho thiết bị y tế.

**CHÚ THÍCH BIỂU TƯỢNG**

Ký hiệu	Giải thích	LOT	Số lô
	Thương hiệu nhà sản xuất	<input checked="" type="checkbox"/>	STERILE
CE	Tiêu chuẩn CE	<input checked="" type="checkbox"/>	Khả tương Ethylene oxide
	Ngày sản xuất	<input checked="" type="checkbox"/>	Không tái sử dụng
	Hạn sử dụng	<input checked="" type="checkbox"/>	DEHP-FREE
	Chu ý: Xem hướng dẫn sử dụng	<input checked="" type="checkbox"/>	NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
			Không làm từ nhựa cao su tự nhiên

**MÔ TẢ**

Túi chứa dịch 100/250ml kèm dây nối PP-9900ACB series, là vật tư sử dụng để chứa thuốc giảm đau, dung dịch y tế dùng cho các máy bơm tiêm điện Ampall PP-9900 để thực hiện các kỹ thuật bơm truyền trong giảm đau và các kỹ thuật bơm truyền khác.

**CHỈ ĐỊNH**

Sử dụng trong bơm truyền thuốc giảm đau và dung dịch Y tế để thực hiện các kỹ thuật bơm truyền trong giảm đau và các kỹ thuật bơm truyền khác.

**CHÔNG CHỈ ĐỊNH**

- Không dùng sản phẩm cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không sử dụng để kết nối với các đầu nối không đủ tiêu chuẩn.

**TÁC DỤNG BẤT LỢI CÓ THỂ XẢY RA**

Chưa có tác dụng bất lợi nào về việc sử dụng thiết bị này.

**CẢNH BÁO**

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Không sử dụng khi quá hạn sử dụng.
- Tái tiệt trùng có thể gây ảnh hưởng tới tính toàn vẹn của thiết bị và/hoặc dẫn đến hư hại thiết bị.
- Tái sử dụng tạo nguy cơ lây nhiễm, bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền những bệnh lây nhiễm từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Thiết bị lây nhiễm có thể dẫn đến tổn thương, bệnh lý hoặc tử vong.

**BIÊN PHÁP PHÒNG NGỪA CHUNG**

- Đảm bảo các điều kiện vô trùng cần thiết khi sử dụng thiết bị.
- Đầu nối phải được lắp chắc chắn, kết nối sai hoặc lỏng có thể dẫn đến rò rỉ hoặc thay đổi áp suất trong đường truyền.
- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã qua đào tạo.
- Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng bao bì dây nối không bị hư hỏng và đóng kín.



**CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HOP LUC**  
 Trụ sở chính: 114/15/50B Phạm Văn Chiêu, P. 9, Q. Gò Vấp, TP HCM  
 Chi nhánh: K4/1/37 Đặng Thùy Trâm, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng  
 TT 08.66540839 | FH 0912.06.1080 | MW www.hoplucmed.com  
 Chuyên cung cấp: Thiết bị - Vật tư Y tế Bệnh viện | Y tế Gia đình | Giải pháp và Dịch vụ Y tế