



THIẾT BỊ Y TẾ VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Địa chỉ: Số 9, ngách 773/1 Đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q.

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH NHÂN

MODEL: B-310S; B-320S; B-320P; B-330S; B-330P; B-340S; B-340P; B-730P; B-740P; B-630S; B-630P; B-830P; B-640S; B-640P; B-840P; B-840PU; B-880PU; B-841; B-881; BH-966; BH-989; BH-990; BP-100; BP-200; BP-300; BP-500; BB-100S; BB-100M; ST-1000; ST-6000; ST-7000; BT-100; BT-200; BT-300; BT-600; BT-600S; BT-500; BT-800

HÃNG SẢN XUẤT: SIGMA-CARE

Chức năng

Cách sử dụng

Giường bệnh được thiết kế để chăm sóc, điều trị bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám. Giường bệnh phải được kiểm soát từ những nhân viên có chuyên môn và được đào tạo.

Hướng dẫn sử dụng

- Khóa bánh xe để cố định xe
- Điều chỉnh độ cao của giường cho phù hợp thực tế.
- Đưa bệnh nhân lên giường và mở khóa.
- Vận chuyển, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân.
- Kết thúc khóa bánh xe lại

Giường bệnh nhân và các phụ kiện cùng nhau phải được đóng gói đúng quy cách. Việc bảo quản phải được thực hiện đúng và phù hợp với điều kiện làm việc của giường bệnh.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Đức