

DENTALUCK CO., LTD
144 Thành Thái P.12, Q.10 ,Tp. HCM
Tel:(84-28) 38684418
E-mail: dentaluck@gmail.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TẤM LÀM KHAY CÁ NHÂN
Số: 191 HDSD A

Mã sản phẩm: 1006.

Mô tả:

Là vật liệu khay tùy chỉnh một thành phần, được bảo dưỡng bằng ánh sáng được cung cấp trong tấm wafer định hình sẵn. Các tấm đúc sẵn có thể dễ dàng được tạo hình, điều chỉnh và cắt xén dùng để lấy dấu răng riêng lẻ.

Hướng dẫn sử dụng:

- Phủ tấm khay lên bề mặt sáp hàm , dùng dao cắt bỏ phần nhựa dư thừa
- Gỡ ra khỏi mẫu hàm .
- Dùng đá mài nhẵn bờ cạnh.

CÔNG TY TNHH DENTALUCK



PGD. *Trần Thụy Lê Dung*

DENTALUCK CO., LTD
144 Thành Thái P.12, Q.10 ,Tp. HCM
Tel:(84-28) 38684418
E-mail: dentaluck@gmail.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PAST ĐÁNH BÓNG HÀM GIẢ
Số: 194 HDSD A

Mã sản phẩm: 1011.

Mô tả:

Là Là một chất rất được ưa chuộng trong việc đánh bóng răng. Cấu trúc mài mòn của nó làm sạch cao răng và mảng bám hình thành trên răng, và nó có tác dụng tuyệt vời giúp răng có vẻ ngoài trắng sáng hơn .

Hướng dẫn sử dụng:

-Thoa đều bột đánh bóng lên cả mặt trong và mặt ngoài của răng. Loại bột này có khả năng làm sạch và trắng sáng răng.

- Sử dụng máy đánh bóng răng chuyên dụng với đầu chổi nhỏ mềm, nhỏ và xoay tròn với tốc độ nhanh, liên tục. Điều này giúp loại bỏ những chất cặn, vụn còn sót lại giúp răng bóng mịn.



PGĐ. *Trần Thụy Lệ Dung*

DENTALUCK CO., LTD
144 Thành Thái P.12, Q.10 ,Tp. HCM
Tel:(84-28) 38684418
E-mail: dentaluck@gmail.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KHAY LẤY DẤU RĂNG
Số: 139 HDSD A

Mã sản phẩm: 1066,1071.

Mô tả:

Là Chất liệu chắc chắn khay dùng một lần. Không cần chất kết dính ấn tượng. nhiều kích thước khác nhau dùng để lấy dấu răng trong quá trình làm phục hình cố định trong nha khoa.

Hướng dẫn sử dụng:

I. Lựa chọn vật liệu: Lựa chọn khay lấy dấu phù hợp với miệng bệnh nhân

II. Thao tác:

- Múc 1 muỗng màu trắng và 1 muỗng màu tím của 2 hộp Putty, dùng tay trộn đều trong 30 giây.
- Đặt vật liệu đã trộn vào khay lấy dấu, dùng ngón tay ấn lõm chất lấy dấu xuống
- Gắn ống Light Body vào súng, sau đó bơm lên bề mặt bị ấn lõm và bơm vào xung quanh vùng răng cần lấy dấu.
- Đưa khay vào miệng bệnh nhân, cho bệnh nhân cắn lại trong 3 phút
- Lấy khay ra và chuyển cho labo đổ mẫu

CÔNG TY TNHH DENTALUCK



PGĐ. *Trần Thụy Lệ Dung*

DENTALUCK CO., LTD

144 Thành Thái P.12, Q.10, Tp. HCM

Tel: (84-28) 38684418

E-mail: dentaluck@gmail.com

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THẠCH CAO NHA KHOA
Số: 191 HDSD A**

Mã sản phẩm: 0532,0541,0541A,0542,0543.

Mô tả:

Là vật liệu thạch dùng để đổ mẫu răng giả.

Hướng dẫn sử dụng:

- Mở nắp bịch đựng thạch cao
- Lấy bột cho vào chén trộn vừa đủ theo nhu cầu
- Pha trộn bột với nước theo tỷ lệ. Sau đó khuấy đều lên
- Đổ hỗn hợp vào khay dấu đã lấy dấu sẵn trước đó
- Đặt lên máy rung thạch cao cho bột khít chặt lại
- Chờ khoảng 30 phút cho bột đông cứng và định hình
- Từ thời điểm này có thể gỡ mẫu răng bằng thạch cao ra để chuyển lên phòng chế tạo răng giả

CÔNG TY TNHH DENTALUCK



PGĐ. Trần Thụy Lệ Dung