

Flexicare Medical Limited.
Cynon Valley Business Park
Mountain Ash
Mid Glamorgan
CF45 4ER, UK.

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

+44 (0)1443 474647
+44 (0)1443 474222
enquiries@flexicare.com
www.flexicare.com

FC1603
02/2012
VP5400-06

CE
0120



STERILE EO


LATEX
FREE

Hướng Dẫn Sử Dụng Thanh chặn lưỡi Guedel Airway

Mã: 038-9x-9xx

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sử dụng để kiểm soát đường thở trên. Dụng cụ hỗ trợ trong việc thông các ống dẫn qua cổ họng để duy trì đường thở và để bệnh nhân tránh trường hợp cắn lưỡi trong việc kiểm soát đường thở trong gây mê, phẫu thuật, cấp cứu hồi sức hoặc hậu phẫu.

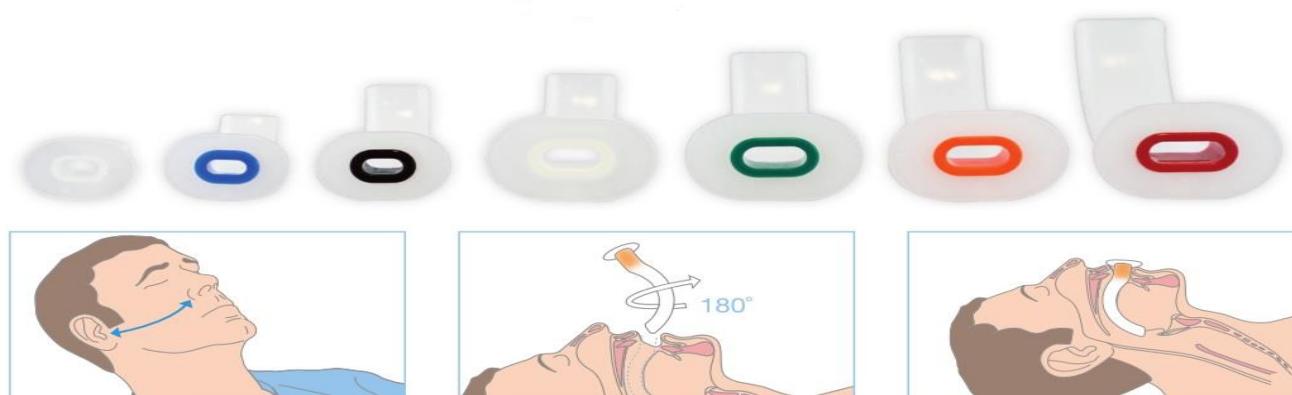

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Kiểm tra kích cỡ của Airway thông qua mã hoá màu ngay trên sản phẩm
2. Đặt bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa khoảng 45o, cẩn thận kiểm tra xem miệng và đường thở bệnh nhân được thông thoáng hay chưa.
3. Xé bao bì airway và kiểm tra tính nguyên vẹn và size sản phẩm lần nữa thông qua mã hoá màu trên miệng airway
4. Bôi trơn airway bằng chất bôi trơn tan trong nước.
5. Một tay nâng đầu bệnh nhân và chèn với mặt cong hướng ngược lại với đường cong khí quản và theo hướng đường thở rồi xoay airway 180 độ theo đường cong khí quản như hình trên
6. Từ từ chèn airway đến khi vành trên của airway chạm vào môi của bệnh nhân thì dừng lại.
7. Đưa các dụng cụ cần thiết vào bên trong airway để kiểm soát đường thở bệnh nhân.