

Tên cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng (tên, địa chỉ):

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An

Địa chỉ: 338/27 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, Tp Hồ Chí minh, Việt nam

Ngày 10 tháng 06 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – BỘ DỤNG CỤ BANH MÓNG MẮT


Mã: 10-5016-1; 10-5067-1

1. Chuẩn bị

- Các dụng cụ banh móng mắt được chứa trong 1 hộp. Và bản thân các banh dạng móc được chứa trong một vỉ đã được tiệt trùng sẵn.
- Bóc các vỉ chứa các móc banh và để gọn vào 1 vị trí nhất định.

2. Sử dụng:

- Trong quá trình phẫu thuật khi đến thì cần dùng đến dụng cụ. Thì mở các vỉ đã được tiệt trùng sẵn
- Dùng các móc và móc vào mép móng mắt rồi kéo theo các hướng khác nhau (4-5 vị trí) để có được chu vi móng mắt theo ý muốn.

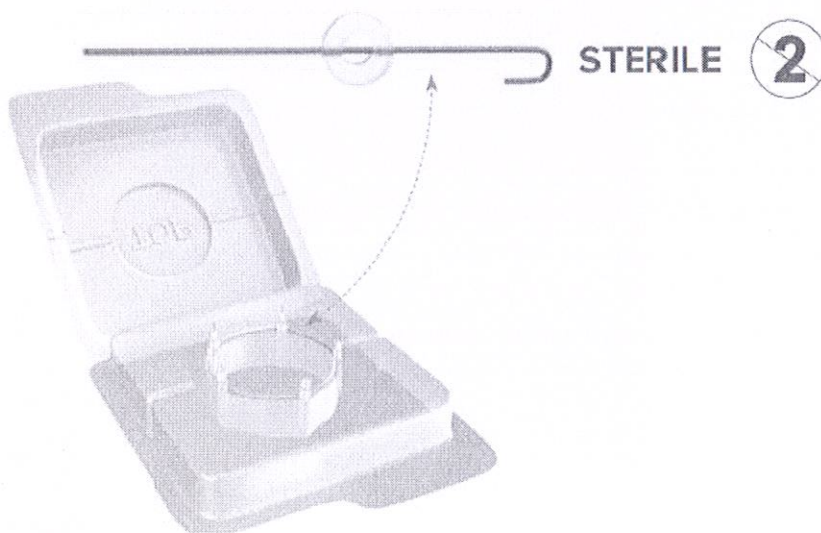

3. Bảo quản:

- Hộp chứa các dụng cụ được bảo quản theo nhiệt độ phòng (Phòng mổ).
- Khi đã sử dụng xong thì sẽ hủy và không sử dụng lại nhiều lần

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Giang

