

Gibeck Humid-Vent®

Bộ trao đổi nhiệt và ẩm

Hướng dẫn sử dụng



vi

Humid-Vent là Bộ trao đổi nhiệt và ẩm (HME) dùng để làm ẩm trong quá trình chăm sóc gây mê và thở máy. Thiết bị làm giảm hiện tượng hạ nhiệt và rét run hậu phẫu. Cần có nhận định lâm sàng của chuyên gia khi đánh giá yêu cầu làm ẩm cho bệnh nhân.

Hướng dẫn sử dụng:

- Đặt đầu nối phía bệnh nhân của HME cao hơn đầu nối ET để tránh nước ngưng tụ.
- Các ống dây phải để thấp hơn HME.
- Nếu bệnh nhân được đặt lại tư thế, có thể cần đặt lại vị trí HME.



Thận trọng:

- Không sử dụng nếu bao bì bị rách hoặc sản phẩm bị hư hại.
- Không sử dụng với các loại khí gây tê dễ gây nổ.
- Thay thế 24 giờ một lần hoặc khi cần thiết để tránh tích tụ dịch tiết.
- Thay thế khối thiết bị ngay nếu bị bắn do dịch tiết hoặc bị tắc nghẽn.
- Humid-Vent được thiết kế để sử dụng một lần, không được làm sạch và tái sử dụng.



Việc tái xử lý các thiết bị y tế được chỉ định sử dụng một lần có thể làm giảm hiệu quả hoặc không có tác dụng. Việc sử dụng lại các thiết bị y tế chỉ sử dụng một lần có thể gây phơi nhiễm với mầm bệnh từ vi khuẩn, virus, nấm hoặc prion. Các phương pháp vệ

sinh và tiệt trùng hợp lệ và các hướng dẫn tái xử lý như các thông số kỹ thuật ban đầu không áp dụng cho các thiết bị y tế này. Sản phẩm này không được thiết kế để có thể vệ sinh, khử trùng hoặc tiệt trùng.

- Xem xét toàn bộ khoảng chết trong hệ thống trước khi sử dụng.
- Khi sử dụng ống thông nội khí quản không có bóng chèn ở trẻ sơ sinh, thường sẽ xảy ra rò rỉ xung quanh ống dây, làm giảm hiệu suất làm ẩm.

Hướng dẫn bảo quản


Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh sáng và ô-zôn (không có tia cực tím nếu có thể).

Tránh ánh nắng mặt trời và giữ cho khô ráo. Không sử dụng sản phẩm khi hàng rào tiệt trùng hoặc bao bì bị hư hại

Chống chỉ định:

- Không sử dụng Humid-Vent cho bệnh nhân có nhiều dịch tiết mũi bọt trong đường thở hoặc bệnh nhân bị ho ra máu.
- Không sử dụng cùng với máy xông khí dung và máy làm ẩm thông thường.
- Không thêm độ ẩm vào HME.

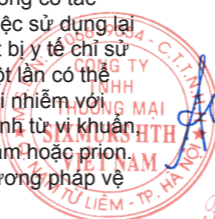

Thận trọng: Luật liên bang (Hoa Kỳ) hạn chế chỉ bác sĩ mới có thể bán hoặc chỉ định dụng cụ này. (Chỉ dành cho Hoa Kỳ và Canada)



GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thu Hằng

Thuyết minh các biểu tượng và ký hiệu quan trọng trên nhãn sản phẩm.

Qty	Số lượng, Số khoản mục
	Không làm từ mủ cao su tự nhiên
	Không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hại

STERILE EO      Kê theo đơn

CE
0124

Teleflex Medical Sdn. Bhd.
Lot PT 2577, Jalan Perusahaan 4,
34600 Kamunting, Perak, Malaysia
Sản xuất tại Malaysia

EC REP

TELEFLEX MEDICAL
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ai-len

Teleflex®