

**HỘ KINH DOANH**

**LÊ THỊ NHUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Tên sản phẩm: **XỊT XOANG MŨI**

Chủng loại/mã sản phẩm: **ĐỨC TRUNG KIÊN**

**1. THÀNH PHẦN**

Bồ công anh: 4ml, Hắc sâm: 1ml, Kim ngân: 3ml, Cỏ cóc mần: 2ml, Mạch môn: 1ml, Nước cất vừa đủ chai 15ml.

**2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG**

- Làm loãng dịch nhầy, rửa trôi bụi bẩn, gỉ mũi bên trong khoang mũi.
- Hỗ trợ các liệu pháp giảm các triệu chứng viêm xoang cấp và mãn tính, viêm mũi dị ứng do thay đổi thời tiết với các biểu hiện: Đau nhức vùng mũi, ê ẩm vùng đầu, trán hoặc vùng mặt; Ngạt, tắc mũi, hắt xì hơi chảy nước mũi trong.

**3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG**

Người thường xuyên bị tắc mũi, hắt xì hơi, chảy nước mũi

**4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

- Lắc nhẹ sản phẩm trước khi dùng.
- Tháo nắp chai.
- Nghiêng đầu sang một bên, đặt nhẹ nhàng vòi xịt vào lỗ mũi và bóp nhẹ.
- Lặp lại thao tác với lỗ mũi còn lại sau khi nghiêng đầu sang phía bên kia.
- Đóng nắp để bảo quản cho lần sử dụng tiếp theo.
- Người lớn: Ngày xịt 3 lần vào mũi trước ăn sáng, trưa, tối.

- Trẻ em từ 5-16 tuổi: Dùng = ½ liều người lớn

**5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

- Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

**6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG**

- Kiểm tra bao bì sản phẩm trước khi sử dụng. Không sử dụng khi bao bì thiết bị y tế bị hư hỏng.

**7. BẢO QUẢN**

- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em.

**8. HẠN SỬ DỤNG**

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*Thái Nguyên, ngày 20 tháng 06 năm 2022*

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

**GIÁM ĐỐC**

*Nhung*  
*Lê Thị Nhung*