

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: **CÔNG TY TNHH THỊNH VŨ PHARM**

Địa chỉ: Cụm 3, thôn Vĩnh Xương Thượng, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

Tên trang thiết bị y tế: **DUNG DỊCH XỊT MŨI**

Chủng loại/module: **T-V Clean**

### \* Hướng dẫn sử dụng:

1. Mở nắp đầu xịt, cầm lọ xịt theo phương thẳng đứng, xịt vào không khí 1-2 lần để phá màng bảo vệ bên trong của đầu xịt
2. Hướng đầu xịt thẳng vào mũi, hơi ngửa cổ ra sau, nhấn đầu xịt, hít nhẹ để dung dịch đi sâu vào khoang mũi

Người lớn: Xịt mỗi bên mũi 1-2 xịt/lần, mỗi ngày 3-4 lần


Trẻ em: Xịt mỗi bên mũi 1-2 xịt/lần, mỗi ngày 2-3 lần

Dùng xong vệ sinh và đậy nắp đầu xịt

\* **Chống chỉ định:** Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm

\* **Bảo quản:** Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt. Sau khi sử dụng đậy kín nắp

**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP**

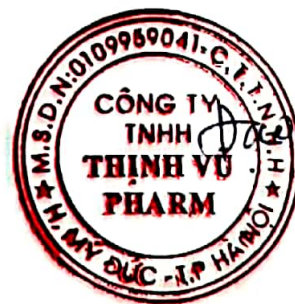

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
***Dinh Văn Đạo***