



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO
Địa chỉ: 63 Dân Tộc, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM
Website: kholico.com - MST: 0315640941

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

“Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế tiếng Việt: xem từ trang số 2”

**Đại diện hợp pháp của cơ sở
Giám Đốc**



HỒNG THỊ KHÁNH TRÂM



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ALKALINE WASH

1. Mục đích sử dụng

- Sử dụng cho các máy xét nghiệm sinh hóa tự động
- Alkaline wash là dung dịch rửa, làm sạch đường ống, kim hút hóa chất, cuvette của máy xét nghiệm sinh hóa tự động

2. Quy cách đóng gói

- Tên sản phẩm : Alkaline Wash
- Mã sản phẩm : 1305990001
- Quy cách: 1 x 2000g (ml)

3. Nguyên tắc

- Natri hypochlorit có trong nước rửa Alkaline wash có thể hòa tan protein, trung hòa và loại bỏ acidoid còn sót lại, và chất hoạt động bề mặt có thể loại bỏ lipid dư trong quá trình làm rửa và làm sạch trên máy sinh hóa tự động.

4. Thành phần

Sodium hypochlorite solution (Activated chlorite)	0.7% - 1.7%
Isopropanol	0.63%

5. Chuẩn bị

- Alkaline Wash sẵn sàng để sử dụng.
- Gắn Alkaline Wash với máy phân tích sinh hóa tự động, thiết bị sẽ tự động pha loãng với nước tinh khiết (nước cất hoặc nước RO) theo tỷ lệ để rửa đường ống và cuvette.
- Đặt dung dịch Alkaline Wash vào vị trí tương ứng khay chứa mẫu bệnh phẩm của máy phân tích sinh hóa tự động để rửa kim hút mẫu và kim hút hóa chất.

6. Lưu trữ và bảo quản

- Bảo quản ở nhiệt độ 10-30⁰C
- Hạn sử dụng được in trên nhãn.

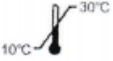






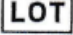


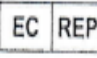
7. Cảnh báo và thận trọng

- Chỉ sử dụng cho xét nghiệm trên máy phân tích sinh hóa và người được đào tạo chuyên môn về xét nghiệm sinh hóa
- Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cũng như hướng dẫn vận hành Máy phân tích hóa sinh tự động
- Không trộn lẫn Acid Wash với Alkaline Wash, Không sử dụng sau khi hết hạn sử dụng.
- Vui lòng đeo găng tay sạch khi thao tác với Alkaline Wash
- Tránh nuốt phải và tiếp xúc với da và mắt, nếu bạn không may gặp phải trường hợp này, vui lòng uống thật nhiều nước và tìm đến cơ sở y tế khẩn cấp.



- Việc thải bỏ tất cả các chất thải được tạo ra bằng cách sử dụng Alkaline Wash phải tuân theo các quy định của địa phương

8. Giải thích ký hiệu

 Nhiệt độ bảo quản 10-30°C	 Mã sản phẩm
 Nhà sản xuất	 Tránh xa ánh sáng mặt trời
 Hạn sử dụng	 Hướng đặt theo hướng lên
 Thành phần đóng gói	 Số lô
 Tham khảo hướng dẫn sử dụng	 Sản phẩm dùng trong chuẩn đoán y khoa
 Được ủy quyền đại diện tại Cộng đồng Châu Âu	

9. Thông tin nhà sản xuất

Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd (Snibe Co.,Ltd)
No.23 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen, 518122, P.R.China
Tel: +86 755 28292700 Fax: +86 755 26637203
Email: sales@snibe.com www.snibe.com