



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO
Địa chỉ: 63 Dân Tộc, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM
Website: kholico.com - MST: 0315640941

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

“Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế tiếng Việt: xem từ trang số 2”

**Đại diện hợp pháp của cơ sở
Giám Đốc**



HỒNG THỊ KHÁNH TRÂM



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CUVETTE

1. Mục đích sử dụng

- Cuvette là vật liệu cần thiết để thực hiện các xét nghiệm trên Máy phân tích sinh hóa tự động Biossays 240.
- Cuvette là vật chứa các mẫu phản ứng trên máy xét nghiệm

2. Quy cách đóng gói

Catalog number	Đóng gói	Dòng máy sử dụng
010102000901	8×10 cái	Biossays 240

3. Thành phần

- Polystyrene

4. Lưu trữ và bảo quản

- Sản phẩm ổn định đến ngày hết hạn ghi trên nhãn khi được bảo quản ở -20-55⁰C
- Hạn sử dụng được in trên nhãn, 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp và độ ẩm cao.

5. Cách sử dụng

- Lắp 8 cuvette vào khay phản ứng.
- Mỗi cuvet phải được khóa bằng hai vít.
- Đảm bảo rằng khay phản ứng không di chuyển khi lắp cuvette

6. Hình ảnh sản phẩm









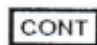
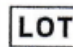

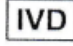
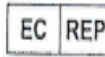


7. Cảnh báo và thận trọng

- Chỉ sử dụng cho xét nghiệm trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động snibe Biossays 240 Plus
- Người vận hành phải được đào tạo chuyên môn về xét nghiệm

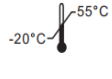

- Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cũng như hướng dẫn vận hành máy xét nghiệm
- Việc thải bỏ tất cả các chất thải phải tuân theo các quy định của địa phương

8. Giải thích ký hiệu

 Nhiệt độ bảo quản -20-55 ⁰ C	 Mã sản phẩm
 Nhà sản xuất	 Tránh xa ánh sáng mặt trời
 Hạn sử dụng	 Hướng đặt theo hướng lên
 Thành phần đóng gói	 Số lô
 Tham khảo hướng dẫn sử dụng	 Sản phẩm dùng trong chuẩn đoán y khoa
 Được ủy quyền đại diện tại Cộng đồng Châu Âu	 Không sử dụng lại
 Nhà nhập khẩu	

9. Thông tin nhà sản xuất

Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd (Snibe Co.,Ltd)
No.23 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen, 518122, P.R.China
Tel: +86 755 28292700 Fax: +86 755 26637203
Email: sales@snibe.com www.snibe.com