



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO
Địa chỉ: 63 Dân Tộc, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM
Website: kholico.com - MST: 0315640941

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

“Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế tiếng Việt: xem từ trang số 2”

**Đại diện hợp pháp của cơ sở
Giám Đốc**



HỒNG THỊ KHÁNH TRÂM



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISE CLEANER

1. Mục đích sử dụng

- Sử dụng cho các máy xét nghiệm sinh hóa tự động
- ISE Cleaner được sử dụng để rửa và bảo dưỡng các đơn vị điện cực của máy phân tích hóa sinh tự động Biossays hoặc Biolumi, cũng như rửa và bảo trì máy phân tích điện giải.

2. Quy cách đóng gói

- Tên sản phẩm : ISE Cleaner
- Mã sản phẩm : 1305990004
- Quy cách: 1 x 20 mL

3. Nguyên tắc

- Sau khi đo các ion điện giải, các điện cực có thể bị nhiễm protein, chất béo và vi khuẩn. Do đó, các điện cực nên được làm sạch. Pepsin có trong ISE Cleaner có thể hòa tan protein và chất hoạt động bề mặt có thể loại bỏ lipid còn sót lại.

4. Thành phần

- Pepsin (0.9 g/L)
- Proclin 300 (0.4 mL/L)
- Tween 80 (1 mL/L)
- KCl (7.455 g/L)

5. Chuẩn bị

- ISE Cleaner sẵn sàng để sử dụng.
- Đặt ISE Cleaner vào vị trí tương ứng của máy phân tích sinh hóa, sau khi đo ion điện giải, các điện cực phải được làm sạch cho lần sử dụng tiếp theo.

6. Lưu trữ và bảo quản

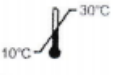






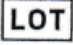

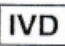
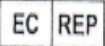
- Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C
- Hạn sử dụng được in trên nhãn.
- Mở nắp lọ ở 2-8°C: có thời hạn sử dụng là 6 tháng.
- Đóng kín hộp đựng khi không sử dụng
- Bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp

7. Cảnh báo và thận trọng

- Chỉ sử dụng cho xét nghiệm trên máy phân tích sinh hóa hoặc máy phân tích điện giải và người được đào tạo chuyên môn về xét nghiệm sinh hóa, điện giải
- Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cũng như hướng dẫn vận hành Máy phân tích hóa sinh tự động
- Vui lòng đeo găng tay sạch khi thao tác với ISE Cleaner
- Tránh nuốt phải và tiếp xúc với da và mắt, nếu bạn không may gặp phải trường hợp này, vui lòng uống thật nhiều nước và tìm đến cơ sở y tế khẩn cấp.
- Việc thải bỏ tất cả các chất thải được tạo ra bằng cách sử dụng ISE Cleaner phải tuân theo các quy định của địa phương



8. Giải thích ký hiệu

 Nhiệt độ bảo quản 10-30°C	 Mã sản phẩm
 Nhà sản xuất	 Tránh xa ánh sáng mặt trời
 Hạn sử dụng	 Hướng đặt theo hướng lên
 Thành phần đóng gói	 Số lô
 Tham khảo hướng dẫn sử dụng	 Sản phẩm dùng trong chuẩn đoán y khoa
 Được ủy quyền đại diện tại Cộng đồng Châu Âu	

9. Thông tin nhà sản xuất

Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd (Snibe Co.,Ltd)

No.23 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen, 518122, P.R.China

Tel: +86 755 28292700

Fax: +86 755 26637203

Email: sales@snibe.com

www.snibe.com