

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thuốc thử xét nghiệm định lượng: HbA1c CON L

<b>Chỉ dẫn / mục đích sử dụng:</b>	- HbA1c CON L là hóa chất kiểm tra giá trị HbA1C trên máy sinh hóa tự động với mức thấp - Hóa chất sử dụng trên các loại máy xét nghiệm sinh hóa;
<b>Tóm tắt và nguyên lý:</b>	Sản phẩm được thiết kế để phục vụ như là một chức năng tương đương với máy có sẵn được phân phối bởi nhà sản xuất: <b>Erba Lachema/CH Séc</b>
<b>Thành phần:</b>	(Xem tờ quy trình kỹ thuật được đóng gói đi kèm cùng với sản phẩm)
<b>Phạm vi xác định:</b>	Xuất hiện rõ ràng, không có bụi hạt nhìn thấy được
<b>Hóa chất chỉ được dùng cho chẩn đoán in vitro (IVD)</b>	
<b>Phân định giá trị:</b>	(Xem tờ quy trình kỹ thuật được đóng gói đi kèm cùng với sản phẩm)
<b>Chuẩn bị hóa chất:</b>	Hóa chất đã sẵn sàng để sử dụng
<b>Cảnh báo và thận trọng:</b>	- Chỉ dùng cho phòng xét nghiệm chẩn đoán. - Chỉ dùng cho hệ thống máy phân tích sinh hóa. - Không được uống, bảo quản lạnh 2-8°C. - Tuân thủ quy trình thực hành tốt phòng xét nghiệm (Good Laboratory Practices – GLP) khi xử lý sản phẩm.
<b>Độ ổn định và bảo quản:</b>	- Các mẫu chứng cả khi chưa mở và đã hoàn nguyên phải được bảo quản ở 2 - 8° C, tránh ánh sáng và nhiệt. - Chưa mở và đã mở: Tối đa 15 tháng trong thời hạn sử dụng được chỉ định nếu tránh được ô nhiễm và bay hơi sau khi đã mở chai.
<b>Mẫu thử:</b>	Huyết thanh, huyết tương của người
<b>Hướng dẫn sử dụng:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cài đặt tham số xét nghiệm theo máy xét nghiệm sinh hóa;</li><li>• Thao tác đưa hóa chất vào ngăn riêng của máy xét nghiệm đã cài đặt, KTV lấy mẫu bệnh phẩm, ly tâm và đưa vào vị trí đặt mẫu;</li></ul> <p>- Thao tác sử dụng mẫu bệnh nhân: Vào mục <b>Patient Entry (F2)</b> ở trên màn hình máy &gt; Nhập các thông tin cần thiết của bệnh nhân, chọn thông số làm xét nghiệm rồi lưu lại &gt; Quay sang mục <b>Status Monitor</b>, nhấn phím <b>“Tam giác màu xanh”</b> máy tự động phân tích mẫu, làm xét nghiệm. <i>Xem kết quả.</i> Chọn mục <b>Reposts(F9)-Batch</b> chọn <b>ALL</b>, bấm <b>SHOW</b> phía bên dưới sẽ hiện kết quả mà máy đã làm xong. <i>In kết quả:</i> Máy sẽ tự động in kết quả sau khi làm xong các thông số xét nghiệm của 1 bệnh nhân.</p>
<b>Xử lý chất thải:</b>	- Sản phẩm này được làm để sử dụng trong các phòng thí nghiệm chuyên nghiệp (Vui lòng tham khảo các quy định của địa phương về việc xử lý chất thải) - Sử dụng thùng chứa chất thải thích hợp để tránh ô nhiễm môi trường. - Tránh vứt bỏ sản phẩm ra môi trường (Tham khảo bảng dữ liệu an toàn – MSDS).

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ  
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 01...  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KINH DOANH  
THIẾT BỊ Y TẾ  
ĐÔNG DƯƠNG  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Văn Thành