



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH

Liên kè 23 - Lô 5 - Mậu Lương - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội

Tel: 024.3351.8639

Nhà máy: Văn Lâm - Liêm Tiết - Phú Lý - Hà Nam

Website: www.asimec.vn

An toàn cuộc sống trong tay bạn!

Hotline: 0987.360.168



NỘI DUNG MẪU NHÃN

Tên trang thiết bị y tế: DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NHANH BỀ MẶT DỤNG CỤ Y TẾ
Chủng loại: ASIRUB



Thành phần:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Ethanol | 75%tt/tt |
| Isopropanol | 8%tt/tt |
| Chlorhexidine Digluconate | 0,5%tt/tt |
| Hàm lượng phụ gia | Vừa đủ 100% |

Tác dụng: Sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ thiết bị y tế, dung trong y tế.

Chế phẩm có hiệu lực diệt 99,99% các vi khuẩn *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Shigella flexneri*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Bacillus subtilis*, nấm *Candida albicans* sau 30 giây tiếp xúc và 3 phút tiếp xúc.

Hướng dẫn sử dụng: Đảm bảo bề mặt cần sát khuẩn ở trạng thái khô, không dính chất bẩn, máu và dịch tiết. Dùng nguyên không pha loãng.

- **Sát khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ y tế:** Lấy khăn sạch thấm vừa đủ ẩm với dung dịch nguyên chất, xoa lên bề mặt dụng cụ, thiết bị y tế sao cho dịch thấm đều lên bề mặt cần sát khuẩn trong tối thiểu 30 giây. Để khô tự nhiên, không lau lại với nước.
- **Sát khuẩn tay trong gia dụng:** Cho 3ml dung dịch nguyên chất (tương đương với 3 lần nhấn vòi) vào lòng bàn tay. Xoa hai tay vào nhau để chế phẩm ướt đều toàn bộ da tay từ cổ tay đến đầu ngón tay trong 30 giây. Để khô tự nhiên, không rửa lại với nước.
- **Sát khuẩn tay thường quy trong y tế:** Cho 4ml dung dịch nguyên chất (tương đương với 4 lần nhấn vòi) vào lòng bàn tay và thực hiện theo kỹ thuật vệ sinh tay thường quy của Bộ Y tế. Đảm bảo thời gian chế phẩm tiếp xúc với toàn bộ bề mặt da tay ít nhất 30 giây. Để khô tự nhiên, không rửa lại với nước.
- **Sát khuẩn tay ngoại khoa:** Thực hiện các bước theo quy trình vệ sinh tay ngoại khoa của Bộ Y tế. Mỗi bước lấy 4ml dung dịch nguyên chất (tương đương với 4 lần nhấn vòi). Đảm bảo thời gian chế phẩm tiếp xúc với toàn bộ bề mặt da ít nhất 3 phút. Để khô tự nhiên, không rửa lại với nước.

Bảo quản: Bảo quản trong thùng chứa gốc. Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ dưới 40°C. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Tránh xa nguồn lửa hoặc nơi có nhiệt độ cao.

Số lô, NSX: xem trên bao bì
HSD: 36 tháng kể từ NSX

Đăng ký và phân phối:
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thiết bị y tế An Sinh
Liên kè 23 - Lô 5 - Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 024.3351.8639 | Website: www.asimec.vn | Hotline: 0987.360.168
Sản xuất: CN Công ty CP Dịch vụ và Thiết bị y tế An Sinh Văn Lâm, Liêm Tiết, Phú Lý, Hà Nam