

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH

Tầng 1 nhà A – số 85 Lương Định Của – Phường Phương Mai – Quận Đống Đa – Thành phố Hà

Nội – Việt Nam



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN KHÁM BỆNH

**Mô tả chung**

Đèn di động, thích hợp cho chiếu sáng các hoạt động phẫu thuật.

Đèn LED được thiết kế và chế tạo với chức năng sử dụng nhiệt độ ánh sáng gần với nhiệt độ ánh sáng tự nhiên và độ chiếu sáng cao giúp bác sĩ phẫu thuật dễ dàng phân biệt dây thần kinh, mô tế bào và máu.

Model: LED SL 88A, LED SL 99A

### 2. Chỉ định

- Dùng chiếu sáng trong khám bệnh tại các bệnh viện, phòng khám, thẩm mỹ viện

### 3. Cấu hình sản phẩm

- Chân đế đèn có 5 bánh xe có khoá: 01 bộ
- Trục đứng treo đèn: 01 cái.
- Đầu đèn LED: 01 bộ.
- Dây nguồn: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

### 4. Hướng dẫn sử dụng

#### 4.1. Chuẩn bị trước khi sử dụng

- ① Đọc kỹ hướng dẫn trước
- ② Xác nhận dây điện đã được cắm vào ổ ( đảm bảo điện áp 220V)
- ③ Lắp tay điều khiển bằng tay bằng cách đẩy nó vào bộ điều khiển ( nghe thấy âm thanh “tick” khi lắp thành công)
- ④ Bật nút nguồn trên bộ điều khiển và nhấn kiểm tra các chức năng của đèn

#### 4.2. Lệnh hoạt động và cách sử dụng.

- ① Nhấn nút “on” của công tắc nguồn trên bộ điều khiển
- ② Nhấn nút điều khiển chiếu sáng và điều chỉnh độ sáng của đèn khi hoạt động
- ③ Chỉnh tiêu cự trường sáng bằng cách xoay tay cầm
- ④ Sau khi sử dụng xong thì tắt nguồn và vệ sinh đèn để sử dụng cho lần sau

#### 4.3. Sau khi sử dụng và bảo trì

- ① Làm vệ sinh mặt kính sau khi sử dụng, sử dụng khăn khô có kết cấu mềm để lau vỏ bảo vệ của vỏ đèn
- ② Làm sạch: Vì bụi có thể tích tụ trên bề mặt của vỏ, hãy sử dụng khăn ướt để làm sạch bụi

### Thận trọng

- Sản phẩm được sử dụng bởi các bác sĩ, y tá hoặc người đã có chứng chỉ
- Không được tháo rời hoặc cải tiến sản phẩm trong bất kỳ trường hợp nào
- Nếu sản phẩm bị hỏng, vui lòng tắt nguồn điện ngay lập tức và đọc hướng dẫn sử dụng để kiểm tra xem hư hỏng có thể sửa chữa hay không. Nếu phương pháp sửa chữa không được nêu trong hướng dẫn, vui lòng KHÔNG thực hiện bất kỳ thao tác nào và liên hệ với chúng tôi hoặc trung tâm dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp



- Khi lau chùi làm sạch hãy để ở chế độ nguồn điện OF, ngăn nước hoặc bất kỳ chất lạ nào vào với sản phẩm
- Vui lòng không gây áp lực cao hoặc gây sốc mạnh đối với sản phẩm
- Vui lòng không lắp ráp hoặc đính kèm các thiết bị hoặc mặt hàng không phải là sản phẩm mà công ty chúng tôi cung cấp. (An toàn của sản phẩm không được đảm bảo khi các sản phẩm khác được gắn hoặc lắp vào sản phẩm)
- Để đảm bảo sử dụng an toàn, hãy đảm bảo điện áp phù hợp với điện áp của sản phẩm trước khi bật nguồn điện

