

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NANO SINOS

(Chủng loại/ Mã sản phẩm: DUNG DỊCH XỊT MŨI HỌNG)

1. Thành phần:

Panthenol, Natri Cloride, Cu⁺⁺, Zn⁺⁺, Nano Silver, Glycerin, Kali Hydroxid, Poly Sorbate, Tinh dầu bạc hà, Eucalyptol, Benzalkonium chloride, EDTA, Acid hyaluronic, Aqua purificata, .

2. Mục đích sử dụng :

Giúp làm sạch, vệ sinh mũi họng, loại bỏ chất nhầy, bụi bẩn trong mũi đọng lại do môi trường ô nhiễm, khói bụi, tạo cảm giác thông thoáng, đảm bảo độ ẩm tự nhiên cho niêm mạc mũi, hỗ trợ phòng ngừa các nguy cơ mắc các bệnh viêm mũi họng, hô hấp, giúp làm loãng và long đờm hiệu quả.

Hỗ trợ ngừa khuẩn, kháng viêm, giảm viêm, hỗ trợ giảm các triệu chứng về mũi, họng như : Viêm xoang, ngạt mũi, sổ mũi, viêm hầu họng, viêm amidan, đau rát họng do nhiễm khuẩn hoặc do các tác nhân dị ứng gây nên.

3. Cách dùng:

Ấn dứt khoát 2-3 nhíp xịt mỗi lần.

Trường hợp viêm xoang, viêm mũi, họng do nhiễm khuẩn, dị ứng: xịt ngày 4-6 lần

Vệ sinh mũi hàng ngày: xịt 3-4 lần

Đối tượng sử dụng:

- Dùng cho trẻ em trên 2 tuổi, người lớn, phụ nữ có thai và cho con bú.

Bảo quản:

- Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý

Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý
Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Công