

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CHUYỂN ĐỔI
TỰ ĐỘNG LƯU LƯỢNG KHÍ**



Thiết bị Medicop

Gửi khách hàng,









Trước khi bạn bắt đầu cài đặt hệ thống khí cung, đọc hướng dẫn vận hành cẩn thận và kỹ càng. Hướng dẫn thích hợp với sản phẩm của bạn và hướng dẫn bạn kỹ càng toàn bộ quá trình, từ việc cài đặt tới vận hành hệ thống. Tuân thủ những qui tắc sẽ đem lại hiệu suất chất lượng cho sản phẩm và góp phần tránh sai sót.

Hư hại trong lúc vận chuyển

Khi bạn nhận được hệ thống, trước hết bạn phải chắc chắn không có hư hại trong quá trình vận chuyển. Trong trường hợp có bất kỳ hư hại nào, liên lạc ngay với đại lý và dịch vụ ủy quyền trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

MÃ BIỂU TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG

Trong hướng dẫn vận hành có một số biểu tượng cần lưu ý và đặt cạnh phân đoạn riêng lẻ của sản phẩm theo thứ tự để đảm bảo công việc chuyên nghiệp và an toàn.

BIỂU TƯỢNG	Ý NGHĨA
	Thận trọng! Bỏ qua hướng dẫn có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản hoặc thương tích cá nhân
	Thận trọng! Nguy cơ điện giật
	Thận trọng! Điện thế nguy hiểm – 230V
	Thận trọng! Nổ khí gas
	Thận trọng! Chất bôi trơn bị cấm
	Không cho phép hút thuốc
	Biểu tượng cảnh báo chung cho việc sử dụng bắt buộc các phương tiện quy định tại hướng dẫn sử dụng
	Vào dấu hiệu để thông tin cụ thể về sản phẩm hoặc yếu tố cá nhân

THẬN TRỌNG

Danh sách tip và thận trọng cho vận hành an toàn và chất lượng của sản phẩm.



CÀI ĐẶT VÀ KẾT NỐI

- Cài đặt và kết nối bởi những chuyên gia, người được đào tạo và theo dõi toàn bộ quy định an toàn.
- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về cáp điện hoặc dòng khí, chỉ những nhân viên chuyên nghiệp mới được làm công việc này.

KHI VẬN HÀNH

- Bộ chuyên đổi dành cho việc cung cấp một tòa nhà nào đó với khí y tế và không phù hợp cho bất kỳ ứng dụng khác.
- Thay đổi sản phẩm và/ hoặc bất kỳ thuộc tính nào của nó là không an toàn và rất nguy hiểm.

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG

- Trong trường hợp hệ thống vận hành trực trực hay hư hại, không nên thử sửa chữa sản phẩm, ngoại trừ những nhân viên có trình độ làm điều đó. Gọi cho trung tâm chăm sóc khách hàng, và yêu cầu cung cấp phụ kiện phù hợp.
- Hư hại hay thiếu sót của sản phẩm không được đưa vào sử dụng! Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra, gọi cho trung tâm chăm sóc khách hàng được ủy quyền hay người bán ngay lập tức.
- Để đảm bảo an toàn, thiết bị chỉ được bảo dưỡng/ sửa chữa bởi những nhân viên có trình độ, đặc biệt, nếu làm việc về điện hay cài đặt khí. Những nhân viên không có trình độ sửa chữa hay bảo dưỡng sản phẩm sẽ gây ra tổn hại về sức khỏe và rủi ro cho tài sản.



ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Sáu