



**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ**  
22/39 ĐƯỜNG CƯ XÁ LỮ GIA – PHƯỜNG 15 – QUẬN 11 – TP HỒ CHÍ MINH  
ĐT: (84) 028 38687460 FAX: (84) 028 38687459 Email: [phusymed@gmail.com](mailto:phusymed@gmail.com)

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**THIẾT BỊ RỬA TAY PHẪU THUẬT VIÊN**  
Loại tự động  
MODEL: SSS-111; SSS-112; SSS-113

**I. CÁCH SỬ DỤNG.**

- 1) Cung cấp nước vào thùng chứa của máy
- 2) Cung cấp xà phòng (chất lỏng Potadine) vào bình chứa.
- 3) Cấp nguồn 220V/AC cho thiết bị
- 4) Bật công tắc chính của thiết bị, để đèn báo trên hộp điều khiển sáng lên.
- 5) Cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ theo nhiệt độ mong muốn (tối đa 45<sup>0</sup>)
- 6) Cài công tắc thời gian theo như thời gian mong muốn. Mức thời gian cho phép : 0 – 30 giây
- 7) Bật công tắc bộ nung nóng lên, để đèn báo trên hộp điều khiển sáng lên.
- 8) Đứng trước bồn cho cảm biến nhận rồi nước xả ra để rửa tay.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ  
22/39 ĐƯỜNG CƯ XÁ LỮ GIA – PHƯỜNG 15 – QUẬN 11 – TP HỒ CHÍ MINH  
ĐT: (84) 028 38687460 FAX: (84) 028 38687459 Email: phusymed@gmail.com

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### THIẾT BỊ RỬA TAY PHẪU THUẬT VIÊN (Loại chạm gôi) MODEL: SSS-111; SSS-112; SSS-113

#### I. CÁCH SỬ DỤNG.

- 1) Cung cấp nước vào thùng chứa của máy
- 2) Cung cấp xà phòng (chất lỏng Potadine) vào bình chứa.
- 3) Cấp nguồn 220V/AC cho thiết bị
- 4) Bật công tắc chính của thiết bị, để đèn báo trên hộp điều khiển sáng lên.
- 5) Cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ theo nhiệt độ mong muốn
- 6) Cài công tắc thời gian theo như thời gian mong muốn. Mức thời gian cho phép : 0 – 30 giây
- 7) Bật công tắc bộ nung nóng lên, để đèn báo trên hộp điều khiển sáng lên.
- 8) Dùng đầu gôi để đẩy công tắc nước và nước tiết trùng phun ra.
- 9) Đẩy công tắc nước tiết trùng lại lần nữa để nước tiết trùng dừng cung cấp.
- 10) Dùng đầu gôi nhấn vào công tắc để cung cấp lượng xà phòng cần thiết.