

Số: 178/CV-STOMACH/VT-SYT

Tp.HCM ngày 23 tháng 08 năm 2017

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên mặt hàng: Dây thông dạ dày

- Dây thông dạ dày dùng để đưa thức ăn, chất nuôi dưỡng, thuốc men vào trực tiếp dạ dày hoặc lấy mẫu dịch dạ dày, các chất không mong muốn từ dạ dày ra ngoài.
- Dây thông dạ dày phải được sử dụng bởi bác sĩ, y tá hoặc người có chuyên môn.
- Dây thông dạ dày sau khi lấy khỏi bao bì có thể sử dụng được ngay.
- Cho dây thông dạ dày qua đường miệng, luôn dây từ từ đến khi vào dạ dày.
- Đầu có phễu nối với bơm tiêm cho ăn hoặc bơm thuốc truyền vào dạ dày.
- Sau khi hoàn thành, rút ống từ từ khỏi bệnh nhân.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



KS. Phạm Thị Hoài Thu