

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY ĐO ĐÔNG MÁU BÁN TỰ ĐỘNG MODEL: SOLEA 2

Hãng sản xuất: BIOLABO SAS – Pháp

I. CHUẨN BỊ

- Kiểm tra ở phía sau của BIO SOLEA 2 đến vị trí tương ứng với lưới điện. Cắm dây nguồn AC vào ổ cắm .
- Kết nối máy in hoặc máy tính đến cáp nối (Chỉ khi máy in hoặc máy chủ có sẵn).
- Kiểm tra xem tất cả dây và cáp được nối đúng cách.
- Cắm bộ sạc AC vào ổ cắm điện.
- Bật máy BIO SOLEA 2 bằng công tắc .

II. CHẠY MẪU (kết hợp với quy trình của thuốc thử)

- ĐIỀU TRA PHÂN TÍCH (Ví dụ về PT - Xác định kép)
- Ủ huyết thanh và thuốc thử 37 độ trước khi tiến hành đo.
- Chọn "PT" Với phím
- Đặt cuvette có “ Bi “vào vị trí ủ nhiệt.
- Lưu ý: lấy cuvette phải đảm bảo không để mồ hôi tay chạm vào cuvette. (mang găng tay y tế)
- Đưa mẫu bệnh phẩm vào cuvette.
- Đặt cuvette có mẫu bệnh nhân và bi trên kênh đo.
- Đưa thuốc thử R1 vào cuvette đồng thời ấn mạnh, đưa cuvette vào trong kênh đo. Máy bắt đầu đo và tự động cho kết quả và in ra.

III.XEM VÀ IN KẾT QUẢ

- Nhấn phím TEST cho tới khi màn hình hiện SAVED DATA (lưu dữ liệu).

IV.VỆ SINH CUỐI NGÀY

- Tắt máy, lau chùi sạch bụi bẩn, che đậy kỹ sau khi làm việc

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC



HÀ SƠN BÌNH