

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

**Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hoàng Quân Việt Nam**

Số 19 Hẻm 387/63/6 Vũ Tông Phan – Khuong Đình- Thanh Xuân- Hà Nội

**Tên vật tư y tế tiêu hao: Đồng hồ oxy (Van oxy)**

- Đổ nước vào trong bình tạo ẩm oxy khoảng một phần ba và đạt đến vị trí mức nước tối thiểu .
- Đóng công tắc dòng chảy , sau đó mở van Oxy từ Bình khí Oxy y tế , đồng thời đồng hồ sẽ chỉ mức áp suất trên đồng hồ đo áp suất . Sau đó bạn điều chỉnh lưu lượng khí theo nhu cầu của bệnh nhân
- Một bên của dây oxy phải được kết nối với bình làm ẩm , và bên khác kết nối với bệnh nhân bằng mặt nạ thở hoặc dây thở .
- Kiểm tra kim đồng hồ . Kim đồng hồ khu vực màu xanh lá là còn oxy , màu vàng là sắp hết oxy và màu đỏ là hết oxy .

2. Lưu ý :

- Kiểm tra đồng hồ áp lực và van khí trước khi sử dụng
- Nước trong bình làm ẩm phải được lọc tinh khiết
- Không có dầu trên bộ Đồng hồ oxy
- Liều lượng oxy sử dụng phải theo chỉ định của bác sĩ
- Khi không sử dụng , khóa van trong bình oxy lại , làm cho phần khí thừa thoát ra ngoài , kim đồng hồ chỉ về số “ 0 ” , và đóng van đồng hồ.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY**



*Hoàng Thị Ngọc*