

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT

Tài liệu được xác nhận bằng chữ ký số

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2022
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
GIÁM ĐỐC

Uông Tuấn Phương

Mã BO11524 1 x 1L

**CONCENTRATED SYSTEM
LIQUID**

BioSystems



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm hóa sinh

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dung dịch được sử dụng cho hệ thống rửa máy xét nghiệm A25 và A15 của Biosystems. Chỉ dùng cho chẩn đoán *in vitro* bởi cán bộ chuyên môn phòng xét nghiệm lâm sàng.

THÀNH PHẦN

A. Thuốc thử: chất hoạt động bề mặt không ion hóa 25 g/L, chất bảo quản, pH 4,5.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

Bảo quản ở 15 - 30°C.

Tuổi thọ: 36 tháng.

Thuốc thử ổn định tới hạn ghi trên nhãn khi được bảo quản ở nhiệt độ khuyến cáo, đóng chặt nắp và tránh tạp nhiễm trong quá trình sử dụng.

Sau khi pha loãng, chất lỏng ổn định trong 3 tháng.

Dấu hiệu thuốc thử bị hỏng: xuất hiện các hạt nhỏ, đục.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thường quy khi thao tác với các thuốc thử trong phòng xét nghiệm. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn khi yêu cầu. Thải bỏ tất cả vật liệu thải theo quy định địa phương. Bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào có thể xảy ra nên được báo cáo tới BioSystems S.A.

CHUẨN BỊ THUỐC THỬ

Pha loãng với nước cất theo tỷ lệ 1/500.

Chủ sở hữu/ Cơ sở sản xuất: BioSystems S.A.

Địa chỉ: Costa Brava, 30. 08030 Barcelona, Spain