

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Scarban[®]
Professional Scar Treatment

**VELVET
TOUCH**
SILICONE SCAR GEL

Tên:

Gel silicon Scarban Velvet Touch

Mô tả sản phẩm

Scarban® Velvet Touch là một loại gel silicon dùng để điều trị sẹo (sẹo phì đại và sẹo lồi) và để ngăn ngừa sự phát triển bất thường của sẹo sau khi phẫu thuật hoặc sau một tai nạn.

Thành phần:

Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane.

Đặc tính:

- Gel silicon Scarban® Velvet Touch làm sẹo phẳng hơn, mịn hơn và mỏng hơn và giảm than phiền của người bị sẹo (gây đỏ da kéo dài, kéo giãn vết sẹo, ngứa ngáy, hạn chế vận động của khớp, các khó chịu và lo lắng về thẩm mỹ).
- Gel silicon Scarban® Velvet Touch là một gel trong suốt, nhờ vào sự độc đáo trong công thức của nó, khi bôi lớp gel nhanh chóng khô và không bị dính bết.
- Gel tạo thành một màng nửa kín ở trên bề mặt da, gia tăng sự hydrat hóa trên da (biểu bì). Sự gia tăng hydrat hóa này đảm bảo rằng vùng da bị tổn thương gây sẹo sẽ phục hồi nhanh hơn và giảm các phản ứng của người bệnh.

Chỉ định:

Scarban® Velvet Touch có thể sử dụng cho cả hai loại sẹo cũ và mới:

- Phòng và điều trị sẹo bất thường (sẹo phì đại và sẹo lồi).
- Điều trị các vết sẹo bồng.

- Điều trị sẹo sau phẫu thuật.
- Giảm phần nân của người bị sẹo (gây đỏ da kéo dài, kéo giãn vết sẹo, ngứa ngáy, hạn chế vận động của khớp, các khó chịu và lo lắng về thẩm mỹ).

Hướng dẫn sử dụng:

- Để có kết quả tối ưu, tốt nhất là nên bắt đầu sử dụng Scarban® Velvet Touch ngay lập tức sau khi vết thương đóng miệng (sau khi tháo chỉ khâu và các vảy của vết thương biến mất).
- Chỉ cần một lượng nhỏ gel silicon cho mỗi lần bôi. Để có liệu pháp tối ưu, nhẹ nhàng bôi một lượng nhỏ gel silicon vào vết sẹo hai lần một ngày.
- Cần bôi lại gel silicon Scarban® Velvet Touch sau khi hoạt động mạnh (thể thao) hoặc sau khi tiếp xúc với nước (tắm, bơi lội).
- Nếu cần thiết, gel silicon Scarban® Velvet Touch có thể kết hợp với 1 lớp trang điểm sau khi đã làm khô.

Nên sử dụng Scarban® Velvet Touch trong bao lâu?

- Thông thường, phải mất ít nhất 3-6 tháng để vết sẹo trở về trạng thái bình thường.
- Có thể dùng gel silicon Scarban® Velvet Touch để bôi lâu dài trên sẹo miễn là vết sẹo vẫn chưa về bình thường hoặc vẫn gây đỏ da hoặc gây khó chịu.
- Tham khảo ý kiến của bác sĩ về thời gian điều trị.

Thời gian sử dụng:

- Một tuýp Scarban® Velvet Touch silicone gel chứa 15 ml.
- Khi được sử dụng đúng cách, một tuýp có thể đủ để bôi trong vài tuần.
- Thời gian sử dụng phụ thuộc vào kích thước của vết sẹo được điều trị.
- Do đó có thể cần nhiều tuýp trong trường hợp điều trị lâu dài.

Các lưu ý và cần trọng:

- Nên để thuốc tránh xa tầm với của trẻ em.
- Tránh tiếp xúc với mắt và niêm mạc.
- Gel silicone chỉ thích hợp để sử dụng bên ngoài.
- Chỉ sử dụng gel silicone trên vùng da kín (sau khi vảy đã biến mất) và không dùng trên vết thương hở.
- Không sử dụng trong trường hợp quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Không sử dụng nếu sản phẩm được giao nhận với bao bì bị hư hỏng.

Phản ứng phụ:

- Trong một số trường hợp hiếm hoi, da có thể có phản ứng nhạy cảm (kích ứng da) đối với điều trị bằng silicone. Nếu gặp trường hợp này, hãy tạm ngừng điều trị.
- Khi cần, Scarban® Velvet Touch có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng xà phòng có tính tẩy nhẹ, thân thiện với da.
- Tiếp tục điều trị một lần nữa khi các kích ứng đã biến mất.
- Nếu các vấn đề về da lại xuất hiện, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.
- Nếu có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào liên quan đến sản phẩm này, phải được báo cáo cho nhà sản xuất và các cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia nơi người dùng cư trú.

Bảo quản:

Hạn sử dụng được in trên bao bì.

Ngày sửa đổi “hướng dẫn sử dụng” cuối cùng:

Tháng 6 năm 2021