



Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa

Hướng dẫn sử dụng

Hóa chất làm sạch dụng cụ kiểm tính Prolystica 2X Concentrate Alkaline Detergent

Mã hàng: 1C34T4PE, 1C34T6PE, 1C3472PE, 1C3481PE, 1C3408WR, 1C3405



### Mục đích sử dụng

Dung dịch tẩy rửa Prolystica 2X Concentrate Alkaline độ pH kiềm được sử dụng để loại bỏ nhiều loại chất bẩn từ các dụng cụ phẫu thuật và thiết bị y tế trong quy trình làm sạch tự động, thủ công và siêu âm.

### Hướng dẫn sử dụng

#### Sử dụng trong máy rửa tự động:

1. Kiểm tra hạn sử dụng của dung dịch trước khi mở thùng, mở nắp
2. Kết nối ống hút dung dịch của máy rửa với can dung dịch
3. Dung dịch tẩy rửa Prolystica 2X Concentrate Alkaline có thể được pha tự động ở 1/8 -1/2 oz./gal. (1 - 4 mL / L) tùy thuộc vào chất lượng nước và tải trọng của chất bẩn. Để sử dụng trên các dụng cụ phẫu thuật bằng thép không gỉ, hãy chọn các kim loại mềm và thiết bị nơi máu, protein, carbohydrate, chất nhầy và lipid tạo thành chất bẩn khó loại bỏ.

#### Sử dụng thủ công/máy rửa sóng siêu âm:

1. Đặt dụng cụ cần làm sạch vào bồn rửa
2. Kiểm tra hạn sử dụng của dung dịch trước khi mở thùng, mở nắp.
3. Đổ nước ấm vào bồn rửa đến mức thích hợp để nhúng đầy đủ các dụng cụ phẫu thuật.



4. Pha loãng sản phẩm ở 1/8 - 1/2 oz./gal. (1 - 4 mL / L) nước ấm
5. Ngâm ít nhất từ 1 đến 5 phút. Chất bẩn khô giàu protein có thể cần thời gian ngâm lâu hơn.
6. Sau khi làm sạch, tất cả các bề mặt nên được rửa kỹ bằng nước ấm
7. Dung dịch nên được đổ bỏ hàng ngày hoặc khi thấy bẩn.

#### **Các biện pháp phòng ngừa**

1. Kiểm tra xem sản phẩm còn trong thời hạn hiệu lực hay không trước khi sử dụng.
2. Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng.
3. Vứt bỏ phải phù hợp với địa phương, tiểu bang và liên bang. Các thùng rỗng nên được rửa sạch và bỏ vào thùng chứa chất thải hoặc đem đi tái chế nếu có thể. Không sử dụng thùng rỗng cho các mục đích khác.

#### **Cảnh báo**

Dung dịch tẩy rửa Prolystica 2X Concentrate Alkaline có thể gây kích ứng/bỏng da, tổn thương mắt, ăn mòn kim loại.

#### **Bảo quản**

Bảo quản ở nơi mát, dưới 32 °C (90 °F). Tránh xa tầm tay trẻ em

#### **Chống chỉ định**

Không có chống chỉ định được biết đến

#### **Thời hạn sử dụng**

24 tháng

