



Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa

### Hướng dẫn sử dụng

Hóa chất làm sạch dụng cụ pH trung tính Prolystica 2X Concentrate Neutral Detergent

Mã hàng: 1C32T4PE, 1C32T6PE, 1C3272PE, 1C3281PE, 1C3208WR, 1C3205



### Mục đích sử dụng

Dung dịch tẩy rửa Prolystica 2X Concentrate Neutral được sử dụng trong rửa thủ công, rửa bằng sóng siêu âm, máy rửa / khử trùng trong bệnh viện và máy rửa cơ học tự động để xử lý các thiết bị y tế thích hợp bao gồm cả dụng cụ phẫu thuật.

### Hướng dẫn sử dụng

#### Sử dụng trong máy rửa tự động:

1. Kiểm tra hạn sử dụng của dung dịch trước khi mở thùng, mở nắp
2. Kết nối ống hút dung dịch của máy rửa với can dung dịch
3. Dung dịch tẩy rửa Prolystica 2X Concentrate Neutral hút tự động ở 1/8-1/2 oz / gal (1-4 mL / L) tùy thuộc vào chất lượng nước và ứng dụng

#### Sử dụng thủ công/máy rửa sóng siêu âm:

1. Đặt dụng cụ cần làm sạch vào bồn rửa
2. Kiểm tra hạn sử dụng của dung dịch trước khi mở thùng, mở nắp.
3. Đổ nước vào bồn rửa đến mức thích hợp để nhúng đầy đủ các dụng cụ phẫu thuật.
4. Pha loãng sản phẩm ở 1/8 - 1/2 oz./gal. (1 - 4 mL / L) nước.
5. Ngâm ít nhất từ 1 đến 5 phút. Chất bẩn khô giàu protein có thể cần thời gian ngâm lâu hơn.



6. Sau khi làm sạch, tất cả các bề mặt nên được rửa kỹ bằng nước.

7. Dung dịch nên được đổ bỏ hàng ngày hoặc khi thấy bẩn.

#### **Các biện pháp phòng ngừa**

1. Kiểm tra xem sản phẩm còn trong thời hạn hiệu lực hay không trước khi sử dụng.
2. Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng.
3. Vứt bỏ phải phù hợp với địa phương, tiểu bang và liên bang. Các thùng rỗng nên được rửa sạch và bỏ vào thùng chứa chất thải hoặc đem đi tái chế nếu có thể. Không sử dụng thùng rỗng cho các mục đích khác.

#### **Cảnh báo**

Dung dịch tẩy rửa Prolystica 2X Concentrate Neutral có thể gây kích ứng da nhẹ, cay mắt.

#### **Bảo quản**

Bảo quản ở nơi mát, dưới 32 °C (90 °F). Tránh xa tầm tay trẻ em

#### **Chống chỉ định**

Không có chống chỉ định được biết đến

#### **Thời hạn sử dụng**

24 tháng

