




# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN TIM MODEL: ECG300G

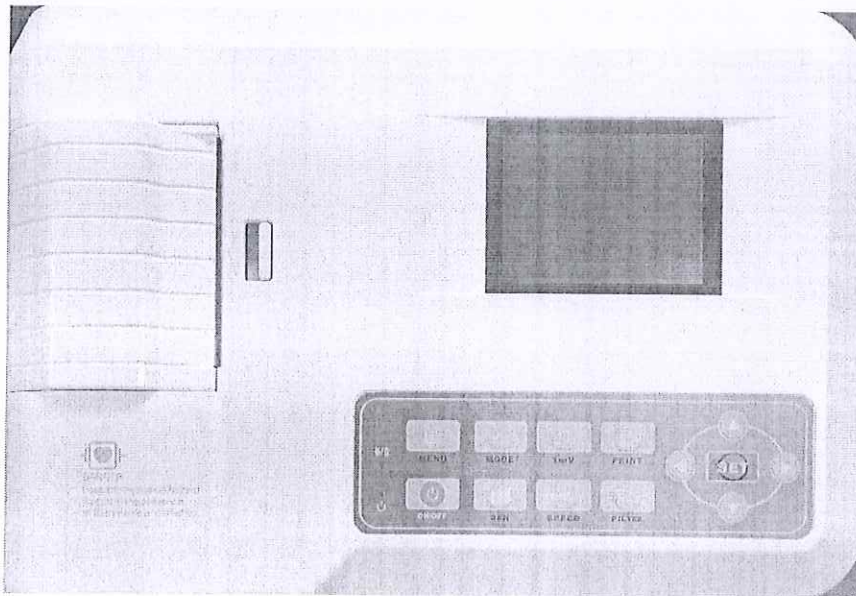

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN TIM 3 CÂN ECG 300G

### I. KHỞI ĐỘNG MÁY

Bước 1: Kiểm tra kết nối dây nguồn, các cổng kết nối. Bật công tắc nguồn đằng sau máy.

Bước 2: Ấn giữ nút “ON/OFF” ở bàn phím trên thân máy

Sau đó, máy sẽ vào màn hình chính để làm việc

### II. CHẠY BỆNH NHÂN

Bước 1: Gắn các điện cực lên người bệnh nhân.

Bước 2: Chọn mục đầu tiên “Thêm mới”, sau đó điền thông tin bệnh nhân (ID, Tên, Năm sinh, Giới tính...). Sau đó nhấn “**Bắt đầu**”.

Bước 3: Khi máy đang trong quá trình đo kết quả hiển thị trên màn hình. Sau khi các biểu đồ đã ổn định, bạn chọn “**PRINT**” ở bàn phím vật lí để in kết quả.

Bước 4: Sau khi in xong ấn nút “**MENU**” trên bàn phím vật lí để thoát ra màn hình chính

### III. XEM LẠI LỊCH SỬ KẾT QUẢ

Bước 1: Trên màn hình chính, chọn biểu tượng “**THU NHẬN**”

Bước 2: Màn hình sẽ hiện danh sách các kết quả điện tim. Bạn chọn 1 kết quả nào đó và ấn “**SET**” trên bàn phím vật lí, để xem lại kết quả

Bước 3: Chọn kết quả của bệnh nhân cần tìm và ấn “**PRINT**” để in kết quả đó.

### IV. TẮT MÁY


Bước 1: Quay về màn hình chính

Bước 2: Ấn giữ nút “ON/OFF” để tắt máy

Bước 3: Sau đó tắt công tắc ở sau máy

## V. MÔ TẢ VỀ MÁY


### 1. Bề ngoài máy

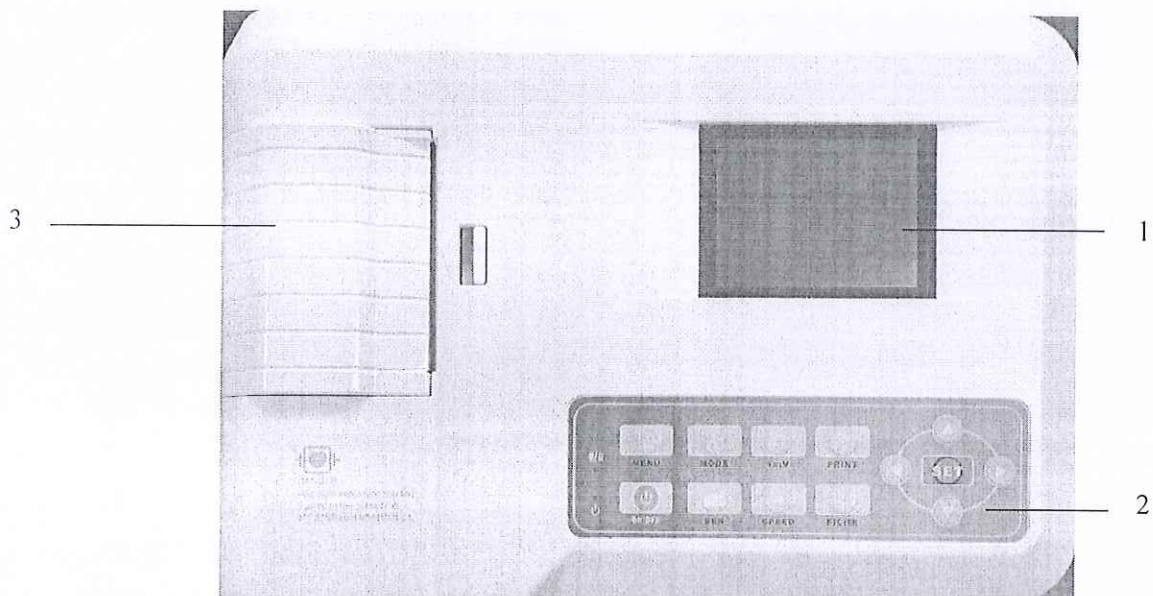

Hình 1: Hình ảnh của máy điện tim ECG 300G



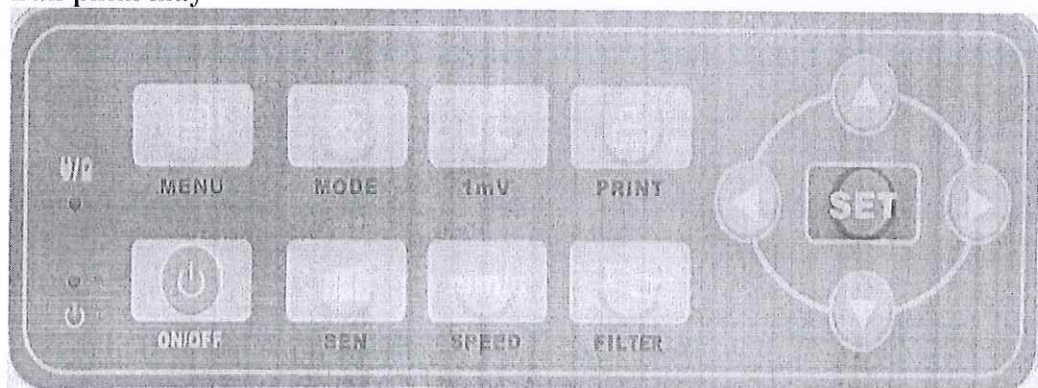


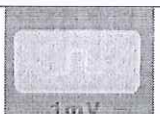



- ① Màn hình hiển thị
- ② Bàn phím vật lý
- ③ Khay lắp giấy in nhiệt

### 2. Bàn phím máy



Hình 2: Bàn phím máy điện tim


80230  
CÔNG  
T  
ÉT B  
ALPH  
HÀNH PH

	Phím on/off: dùng để bật tắt máy
	Phím SEN: dùng để chỉnh độ cao thấp của xung
	Phím SPEED: dùng để chỉnh độ rộng của xung
	Phím FILTER: chỉnh điện áp đầu vào thường sẽ để (AC+EMG)
	Phím PRINT: dùng để in kết quả
	Phím 1mV: Tính độ cao của xung
	Phím MODE : dùng để chỉnh chế độ in
	Phím MENU : Dùng để vào chức năng của máy, sử dụng phím Menu để quay trở lại thao tác
	Phím lựa chọn thao tác: Lên, xuống, trái, phải Phím SET: dùng để khẳng định lựa chọn

## VI. PHẦN CÀI ĐẶT

Từ màn hình chính có giao diện như sau:

1409  
GTY  
HH  
ATTU  
AME  
CHAT

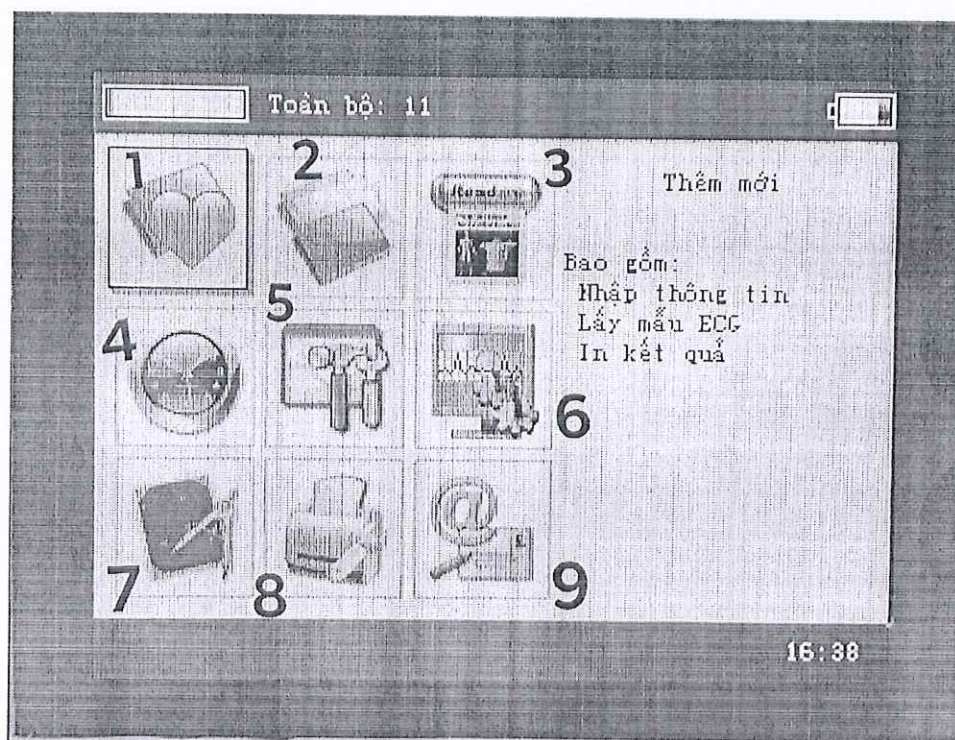

Hình 3: Màn hình chính của máy

Mục 1: Mục chạy bệnh nhân	Mục 2: Mục xem lại kết quả	Mục 3: Hướng dẫn gắn điện cực
Mục 4: Cài đặt ngày giờ	Mục 5: Cài đặt hệ thống: ngôn ngữ, âm thanh, bàn phím,....	Mục 6: Cài đặt hiển thị chạy mẫu: bộ lọc, độ lợi, tốc độ,...
Mục 7: Cài đặt phân tích: nhịp tim, kiểu, thời gian dừng, ....	Mục 8: Cài đặt máy in: chế độ in, kiểu in,...	Mục 9: Thông tin về máy

