

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

Số 09, Đường Lam Sơn, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- 1. Tên thiết bị:** Tay khoan nha khoa
- 2. Chứng loại:** Theo phụ lục đính kèm
- 3. Hãng, nước sản xuất:** Bien-Air Dental SA, Thụy Sĩ
- 4. Hãng, nước chủ sở hữu:** Bien-Air Dental SA, Thụy Sĩ
- 5. Mục đích sử dụng:** Dùng trong quá trình điều trị nha khoa. Hỗ trợ nha sĩ trong việc cắm Implant và phẫu thuật cắt răng, nhổ răng khôn.
- 6. Chống chỉ định (Nếu có):** Người không có chuyên môn nha khoa chuyên nghiệp không được sử dụng máy.
- 7. Hướng dẫn sử dụng:** Mang găng tay bảo hộ khi lắp đặt hay sử dụng.

Bước 1: Vệ sinh tay khoan, phun dầu tay khoan thủ công hoặc bằng thiết bị hỗ trợ chuyên dụng. Sau đó, Hấp vô trùng tay khoan với nồi hấp chuyên dụng.

Bước 2: Gắn mũi khoan phù hợp vào tay khoan nha khoa, sau đó gắn vào động cơ của thân máy cắm implant chuyên dụng để tạo lực quay.

Bước 3: Chọn thông số phù hợp với từng mục đích sử dụng cho máy cắm sử dụng tay khoan nha khoa.

Bước 4: Tiến hành thao tác điều trị với tay khoan nha khoa cho bệnh nhân.

8. Cảnh báo và thận trọng:

- Đọc kỹ và tuân thủ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng.
- Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn về điện và sử dụng điện.
- Đảm bảo chiều dài dây cáp điện phù hợp, không bị kéo căng tránh giảm công suất điện cung cấp cho tay khoan.
- Đeo găng tay hoặc đồ bảo hộ phù hợp khi kiểm tra, thay đổi mũi khoan cho tay khoan nha khoa.
- Tuyệt đối phải bật máy chạy tự động 10 - 15 giây để lưu thông chất bôi trơn cho tay khoan và loại bỏ phần dầu dư thừa sau khi khử khuẩn/ tiệt trùng và trước khi sử dụng điều trị nha khoa cho bệnh nhân.
- Không kết nối dụng cụ thêm trên động cơ quay.
- Không khởi động tay khoan khi chưa có mũi khoan.
- Sau mỗi cuộc điều trị, tay khoan phải được vệ sinh, khử khuẩn, tra dầu ngay (trễ nhất 2 giờ sau phẫu thuật) sau đó tiệt trùng.
- Tra dầu và tiệt trùng trước khi sử dụng cho bệnh nhân.
- Không ngâm tay khoan nha khoa vào bồn sóng siêu âm.

- Sử dụng dung dịch vệ sinh tay khoan nha khoa có độ PH trung bình, dung dịch vệ sinh có thành phần nền từ enzyme. Không sử dụng dung dịch vệ sinh có chứa chlorine, acetone và thành phần tẩy rửa.
 - Xử lý chất thải, tái chế theo quy định của địa phương.
 - Chỉ sử dụng tay khoan nha khoa trong điều kiện môi trường thuận lợi ở mức cho phép.
 - Tuyệt đối sử dụng tay khoan nha khoa theo đúng mục đích sử dụng được chỉ định để tránh ảnh hưởng sự an toàn, sức khỏe phòng tránh những tai nạn ngoài ý muốn và khả năng bị nhiễm khuẩn theo đúng hướng dẫn sử dụng và lắp đặt.
 - Những vật liệu sau khi sử dụng tay khoan nha khoa như dầu bôi trơn, dung dịch vệ sinh khử khuẩn cũng phải được tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng của hãng.
 - Không được sử dụng tay khoan nha khoa cho các vết thương mô mềm hở và vết vừa nhổ răng mới,
 - Khuyến cáo sử dụng phụ kiện thay thế chính hãng.
- 9. Tác dụng bất lợi có thể xảy ra:** Giảm hiệu quả buổi điều trị hoặc người sử dụng có thể bị điện giật nếu không tuân thủ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng.
- 10. Điều kiện bảo quản:** Bảo quản nơi thoáng mát, nhiệt độ phòng.

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU