

<b>Description</b> Mô tả	Hướng dẫn sử dụng ống nghiệm không nút 16x100mm	<b>Catalog No. + Version</b> Mã bao bì + (phiên bản)	401004V01VN
<b>Size</b> Kích thước	297x210 mm	<b>Content Editor/Date</b> Soạn nội dung/Ngày	
<b>Material</b> Chất liệu	Giấy offset double A 70gsm/80gsm	<b>Designer/Date</b> Người thiết kế	<i>Bao Bì Huỳnh</i>
<b>Processing</b> Gia công	In 01 mặt	<b>Design Date</b> Ngày thiết kế	28/06/2022
<b>Printing Color</b> Màu sắc in	In 01 màu	<b>Design Review/Date</b> Xem lại thiết kế/ngày	<i>Đào Đình Khởi</i>
<b>Customer Rev./Date</b> Ý kiến khách hàng/Ngày		<b>Content Review/Date</b> Xem lại nội dung/Ngày	28/6/2022
		<b>Approved/Date</b> Phê duyệt/Ngày	<i>Đào Đình Khởi</i>
		<b>Effective Date</b> Ngày có hiệu lực	
<b>Customer App./Date</b> Khách hàng duyệt/Ngày		<b>Receiving Dept.</b> Bộ phận nhận tài liệu	<input type="checkbox"/> DCC <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> TK <input type="checkbox"/> KHVT <input type="checkbox"/> QC <input type="checkbox"/> SX



**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG****Ống Nghiệm Không Nút 16x100mm (Test Tube 16x100mm Without Plug)****I. Mô tả hàng hóa**

- Ống nghiệm không nút 16x100mm được sử dụng để thu thập, vận chuyển, xử lý mẫu xét nghiệm.
- Ống được làm từ nhựa PP hoặc PS, không màu, không phản ứng với mẫu đựng bên trong.

**II. Mục đích sử dụng**

- Dùng trong thu thập, vận chuyển và xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm, hoặc các cơ sở y tế.

**III. Hướng dẫn sử dụng**

- Sản phẩm được thiết kế để sẵn sàng sử dụng.
- Thu và lấy mẫu vào bên trong ống.
- Bảo quản, vận chuyển mẫu hoặc thực hiện các xét nghiệm liên quan theo chỉ dẫn tại cơ sở xét nghiệm.

Lưu ý: Không để dính mẫu bên ngoài thành ống nghiệm.





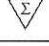





**IV. Cảnh báo thận trọng và các vấn đề khác**

- Kiểm tra bao bì sản phẩm trước khi sử dụng. Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn dùng.
- Không sử dụng sản phẩm nếu có dấu hiệu bị hỏng, bao bì rách và hỏng.
- Đeo găng tay bảo hộ, đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Sản phẩm sử dụng 1 lần.
- Tuân thủ các quy định xử lý rác thải sau khi sử dụng.
- Vận chuyển nhẹ nhàng, tránh ném hay làm rơi làm ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm.

**V. Hạn sử dụng và bảo quản**


- 5 năm kể từ ngày sản xuất.
- Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

**Các ký hiệu**

	Chỉ sử dụng trong chẩn đoán in vitro		Số lô		Nhà sản xuất
	Mã sản phẩm		Số lượng		Chỉ dùng một lần
	Tránh ánh nắng mặt trời		Hạn dùng		Không dùng khi bao gói bị hỏng
	Tham khảo HDSD				

** CÔNG TY TNHH POLYGREEN VIỆT NAM**

CCN Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 ISO13485

