

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

### 1. CÁCH SỬ DỤNG:

- Trước khi sử dụng kỹ thuật viên, y tá cần hiểu rõ về mục đích sử dụng cũng như hạn chế của dụng cụ phẫu thuật trong thực hiện phẫu thuật.
- Khi sử dụng những dụng cụ phẫu thuật có cạnh, đầu sắc nhọn cần cẩn thận tránh cứa qua lớp bao tay phẫu thuật, không được chạm vào đầu dụng cụ khi sử dụng.
- Phải luôn tiệt trùng dụng cụ trước và sau khi sử dụng.

### 2. CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ:

- Chỉ sử dụng nước cất để rửa sạch dụng cụ, không sử dụng nước có chứa Clo vì có thể làm hỏng hoặc phá hủy dụng cụ.
- Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính ăn mòn, nên sử dụng dung dịch khử trùng với độ pH = 7.
- Dụng cụ nên được tiệt trùng bằng phương pháp tiệt trùng nhiệt ẩm ở 132°C trong khoảng 15 phút trước khi sử dụng để phẫu thuật, nhiệt độ tiệt trùng không được vượt quá 137°C.
- Tất cả dụng cụ phải khô hoàn toàn trước khi bảo quản, bảo quản dụng cụ ở nơi khô ráo, thoáng mát.
- Khi sắp xếp dụng cụ, phải luôn đặt các dụng cụ trong tấm vải mềm hoặc khăn, dụng cụ nặng ở bên dưới, dụng cụ nhẹ hơn ở bên trên để tránh hư hỏng dụng cụ.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Yarir Bin naeem