

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: DÂY TRUYỀN DỊCH

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG.

Không sử dụng khi bao gói sản phẩm bị hỏng hoặc rách.

Sử dụng ngay khi mở bao gói sản phẩm.

Không sử dụng nếu không có nắp bảo vệ ở các đầu nối của sản phẩm.

Hủy bỏ sản phẩm một cách an toàn sau khi sử dụng để tránh lây nhiễm.

Sử dụng 1 lần. Không sử dụng lại. Không tiệt trùng lại. Không tái chế.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đóng kín khóa chỉnh giọt
- Cắm kim vào chai truyền dịch
- Treo chai lên giá, chỉnh lượng dịch đầy $\frac{1}{2}$ thân bầu nhỏ giọt
- Mở nút thông khí và khóa chỉnh giọt, đuổi hết khí trong ống dây
- Cắm chặt dây truyền vào kim, chỉnh tốc độ nhỏ giọt hợp lý và bắt đầu truyền dịch.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



Giám Đốc
Vũ Thị Hào