



CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG

Địa chỉ: 47 Phú Đồng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Liên hệ: 028 3859 0878

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vật liệu đặt ổ xương khô

Alveogyl là một dạng bột nhão được sử dụng để băng trong trường hợp ổ xương khô hoặc băng sau nhổ răng khó khăn hoặc chấn thương ở những bệnh nhân có tiền sử khô ổ răng.

Thành phần:

- Penghawar djambi, eugenol, sodium lauryl sulphate, calcium carbonate, mint flavour, excipients.

Chỉ định

- Điều trị viêm ổ xương khô, cầm máu sau nhổ răng.

Đặc tính và ưu điểm

- Với tính đồng nhất nhờ các sợi xơ Penghawar dễ đặt và bám dính tốt vào ổ răng.
- Cho hiệu quả dễ chịu đối với các mô ổ răng giúp giảm đau nhanh chóng.
- Sử dụng tiện lợi và dễ dàng: chỉ một bước đặt Alveogyl, tự đào thải mà không cần khâu vết thương và không cần chú ý đặc biệt nào ngoài việc quan sát quá trình thương.
- Được sử dụng như một chất đặt chống viêm ổ xương khô



Đóng gói: Lọ 10gr

Hướng dẫn sử dụng:

- 1/ Sau khi nhổ răng, Lấy một viên nhỏ (khoảng 0,20g) và đặt nó nhẹ nhàng vào ổ răng đã chuẩn bị sẵn.
- 2/ Cho bệnh nhân cắn bông gòn, không đè ép hoặc khâu vật liệu trong ổ răng.
- 3/ Quan sát quá trình lành thương trên ổ răng bệnh nhân.

*Lưu ý: không được khâu

Cảnh báo và thận trọng:

- Bệnh nhân không nên súc miệng trong vòng 24h theo chỉ định của nha sĩ và không được điều trị quá 4 răng cùng lúc.
- Đóng nắp ngay sau khi sử dụng.
- Bảo quản ở nhiệt độ 5-30 độ.