

## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

### XỊT HỌNG ENTHROAT

#### 1. THÀNH PHẦN

Natri hyaluronat, Chiết xuất Cúc la mã (Chamomile extract), N-acetylcysteine, L-Arginine, Glycerin, Acid citric, Natri benzoat, Natri saccharin, Kali sorbat, Hương bạc hà, Nước tinh khiết.

#### 2. CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

- Làm sạch khoang miệng, họng, ngăn ngừa vi khuẩn, virus gây bệnh vùng hầu họng, niêm mạc miệng.
- Hỗ trợ điều trị các bệnh lý đường hô hấp bao gồm: viêm họng hạt ở cả giai đoạn cấp tính và mãn tính; khan tiếng và ho có tính chất kích thích, sau virus hoặc do các chất ô nhiễm môi trường; hội chứng cảm cúm hoặc cảm lạnh; hậu quả của các cuộc phẫu thuật tai mũi họng; biểu hiện ngoài thực quản do trào ngược dạ dày ở đường hô hấp trên (khó nuốt, viêm họng mãn tính, ho dai dẳng).

#### 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người lớn: 3 – 4 nhát xịt/lần, tối đa 5 lần/ngày.

Trẻ em trên 12 tuổi: 2 – 3 nhát xịt/lần, tối đa 4 lần/ngày.

Không nên ăn hoặc uống ít nhất 10 phút sau khi sử dụng sản phẩm.

#### 4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người dùng mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

#### 5. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Lắc trước khi sử dụng.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

#### 6. GHI NHÃN


- Ghi nhãn theo qui định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của chính phủ về ghi nhãn hàng hóa.

#### 7. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Chai 10 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml. Hộp 1 chai, 2 chai kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

#### 8. BẢO QUẢN

- Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C. Để xa tầm tay trẻ em.

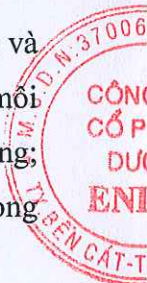

## 9. HẠN DÙNG

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên bao bì sản phẩm.

## 10. VẬN CHUYỂN

- Phương tiện vận chuyển sản phẩm phải khô, sạch, được che mưa nắng, không có chất độc hại và không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Bình Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2022

**Giám đốc chất lượng**



*Võ Việt Hùng*

