

## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

### Gel bôi nướu TeeKids

#### 1. THÀNH PHẦN

Trong 10ml có chứa:

Chiết xuất hoa cúc (Anthemis Nobilis Flower Extract) 200mg

Chiết xuất rễ Cẩm quỳ (Althaea Officinalis Root Extract) 200mg

Tá dược: Carrageenan, Kali sorbat, Acid citric, Carboxymethyl cellulose natri, Natri benzoat, Alcohol (0,0002%), Glycerin, Sorbitol, Nước tinh khiết vừa đủ.

#### 2. CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

- Làm mềm và dịu nướu, chăm sóc nướu răng ngay khi có các dấu hiệu của quá trình mọc răng như nướu bị căng bọng, có màu đỏ, răng bắt đầu nhú lên,... ở trẻ từ 3 tháng tuổi.

#### 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Rửa tay thật sạch.
- Đặt trẻ ở tư thế ngồi. Lấy 1 lượng gel vừa đủ. Dùng đầu ngón tay hoặc gạc rơ lưỡi (nếu có) thoa lên nướu của trẻ và mát xa trong vòng 10 – 15 giây.
- Tối đa 6 lần mỗi ngày (quá trình mọc răng kéo dài từ 5 đến 7 ngày). Tốt nhất nên thoa sau bữa ăn và trước khi đi ngủ.

#### 4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người dùng mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

#### 5. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Tránh tiếp xúc với mắt. Trong trường hợp có tiếp xúc thì rửa sạch ngay với nước.

#### 6. GHI NHÃN

- Ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của chính phủ về ghi nhãn hàng hóa.

#### 7. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- Tuýp 10ml; 15ml; 20ml; 30ml; 50ml; 60ml; 100ml. Hộp 1 tuýp; 2 tuýp; 3 tuýp; 4 tuýp; 5 tuýp; 10 tuýp kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

#### 8. BẢO QUẢN

- Để nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Sau khi mở có thể bảo quản trong tủ lạnh hoặc ở nhiệt độ phòng. Để xa tầm tay trẻ em.

#### 9. HẠN DÙNG



- 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên bao bì sản phẩm.  
Chỉ dùng trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp.

#### 10. VẬN CHUYỂN

- Phương tiện vận chuyển sản phẩm phải khô, sạch, được che mưa nắng, không có chất độc hại và không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Bình Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2022

**Giám đốc chất lượng**



*Võ Việt Hùng*

