



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT SƠN ANH

DC: 2.08 Lầu 2, Khối B – Khu dân cư Trung Sơn 6,57ha – Khu 6A – Khu chức năng số 6 – Đô thị mới Nam Thành Phố, Ấp 4B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 62703713 - Email :sanec@sanec.com.vn

TPHCM; 15.06.2022

No: 2022_01/TBYT_HDSD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: Đầu tip lọc	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Dùng để truyền (hút, xả) chất lỏng
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Bao gồm các loại thể tích 10ul; 20ul; 50ul; 100ul; 200ul; 1000ul; 1250ul
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng để hỗ trợ bác sĩ, nhân viên y tế, kỹ thuật viên trong việc xét nghiệm bệnh phẩm Chỉ sử dụng 1 lần
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Dùng kết hợp với dụng cụ hút mẫu trong quá trình xét nghiệm Cách sử dụng như sau: <ul style="list-style-type: none">- Mở bao bì đóng gói sản phẩm- Lấy đầu tip ra khỏi hộp- Gắn tip lọc vào pipet cần sử dụng- Hút chất lỏng cần lấy theo thể tích xác định- Xả chất lỏng đã lấy phía trên- Tháo bỏ tip lọc đã sử dụng vào thùng rác thải theo đúng quy định