

# CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

3 Lê Lăng, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MASK XÔNG KHÍ DUNG Model: Nebulizer Mask

Bước 1: Cho thuốc được kê đơn vào bầu xông khí dung ( tối đa 6cc)

Bước 2: Care thận đậy nắp lại

Bước 3 : Gắn bầu xông vào co nối của mask xông, gắn 1 đầu dây nối oxy vào đầu phần còn lại của bầu xông, một đầu gắn với máy xông .

Bước 4: Mở máy xông hoạt động đến khi thuốc ra mặt nạ thì áp vào miệng mũi, điều chỉnh thanh nhôm trên mask cho vừa với mũi.

Bước 5: Cột dây cố định mặt nạ.



**GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Thị Thùy Trang*