

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**DÂY TRUYỀN MÁU KHÔNG CÓ VAN THÔNG KHÍ**

**B.T SET (Ecotran – NV).**

HÃNG SẢN XUẤT: POLYBOND

NƯỚC SẢN XUẤT: AN ĐỘ

**CHẤT LIỆU:**

Polypropylen, ABS, PVC, Latex rubber, SS Cannula, Nylon.

**MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:**

Dây truyền máu được sử dụng, để cung cấp máu vào hệ thống tuần hoàn chung của con người.

Bằng cách sử dụng ống thông tĩnh mạch hoặc kim lùn.

**CHỈ ĐỊNH:**

Truyền máu và các thành phần của máu.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Không sử dụng sản phẩm cho những bệnh nhân đã được biết là nhạy cảm cao với các chất liệu làm sản phẩm.

Ngoại trừ nước muối sinh lý, không có bất kỳ thuốc hay dung dịch nào được thêm vào máu và các thành phần của máu.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

- Đóng con lăn (cái mà dùng để điều chỉnh dòng)
- Tháo nắp bảo vệ khỏi cọc nhọn và cắm cọc nhọn vào hộp đựng đến hết chiều dài của nó.
- Bóp buồng nhỏ giọt và điều chỉnh chất lỏng
- Tháo nắp bảo vệ của kim truyền và mở kẹp con lăn (bộ điều chỉnh dòng chảy)
- Đẩy không khí ra khỏi ống PVC & đóng kẹp con lăn
- Chèn kim vào tĩnh mạch & điều chỉnh dòng chảy bằng cách điều chỉnh kẹp lăn để đạt được tốc độ dòng chảy mong muốn

**THỜI HẠN SỬ DỤNG:**

- Thời lượng sử dụng tối đa được khuyến nghị là 4 giờ hoặc 4 đơn vị, tùy theo điều kiện nào đến trước hoặc giữa các sản phẩm Máu và Máu.

**THẬN TRỌNG:**

- Bác sĩ có chuyên môn hoặc nhân viên y tế mới được sử dụng
- Đọc hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Nên sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng
- POLYBOND TỪ CHỐI BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ CÁC HẬU QUẢ CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG CÁCH.
- Kiểm tra trực quan và kiểm tra cẩn thận sản phẩm và bao bì trước khi sử dụng. Vận chuyển và xử lý không đúng cách có thể gây hư hỏng cấu trúc và / hoặc chức năng cho thiết bị hoặc bao bì.



- Không tiếp xúc với nhiệt độ, độ ẩm quá cao và ánh nắng trực tiếp vì nó có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của bao bì / vô trùng
- Sản phẩm được đảm bảo không độc hại, vô trùng và không gây sốt nếu gói chưa mở hoặc bị hư hỏng.
- Sản phẩm nên được sử dụng ngay sau khi mở gói
- Chỉ sử dụng một lần. Không tái sử dụng, tái chế hoặc khử trùng lại. Việc sử dụng lại, xử lý lại hoặc xác thực lại có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn về cấu trúc của thiết bị và / hoặc dẫn đến hỏng hóc thiết bị, do đó, có thể dẫn đến thương tật và bệnh tật cho bệnh nhân.
- Tái sử dụng, tái xử lý hoặc tái chế cũng có thể tạo ra nguy cơ nhiễm bẩn thiết bị và / hoặc gây nhiễm trùng hoặc lây nhiễm chéo cho bệnh nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lây truyền (các) bệnh truyền nhiễm từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác.
- Việc làm nhiễm bẩn thiết bị có thể dẫn đến nhiễm trùng hoặc bệnh tật cho bệnh nhân
- Sau khi sử dụng, vui lòng vứt bỏ sản phẩm bằng cách đặt lại sản phẩm đã sử dụng vào thùng đã mở
- đóng gói và tiêu hủy gói hàng một cách an toàn và có trách nhiệm.
- Đảm bảo xử lý an toàn và đúng cách các sản phẩm và bao bì đã qua sử dụng / loại bỏ để tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường, trẻ em và động vật đi lạc
- Việc thải bỏ phải tuân theo luật pháp địa phương ở quốc gia sử dụng
- Không nên sử dụng thiết bị cho trẻ em, phụ nữ có thai, đang cho con bú & phụ nữ đang cho con bú
- Sản phẩm có chứa cao su có thể gây dị ứng như kích ứng da, mắt, mũi niêm mạc dạ dày đối với bệnh nhân, người sử dụng, phụ nữ có thai, trẻ mới sinh và bà mẹ đang cho con bú.
- Kiểm tra hạn sử dụng trước khi sử dụng.

**SẢN XUẤT BỞI:**

Polybond India Pvt. Ltd.

Sanaswadi, Pune 412208,

Maharashtra, INDIA

Customer care No.: +91-2138679313

Email: [eversure@rathigroup.com](mailto:eversure@rathigroup.com)

Web: [eversuremedical.com](http://eversuremedical.com)

