

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Khăn lau vệ sinh**

Chủng loại/mã sản phẩm: **Dr.You**

### THÀNH PHẦN

Khăn trắng mềm được tẩm dung dịch chứa các thành phần: Chiết xuất Kim Ngân Hoa, Lá Xô Thom, Trà xanh, Lô Hội, Vitamin E, Tinh dầu Bạc Hà, Citronellyl methylcrotonate, 2-methyl-5-cyclohexylpentanol, Nước tinh khiết.

### CÔNG DỤNG

Lau vệ sinh vùng kín (âm hộ) hàng ngày, sau khi đi vệ sinh, đặc biệt trong thời kỳ ra nhiều huyết trắng, thời kỳ kinh nguyệt, hậu sản, thai nghén.

Làm sạch nhẹ nhàng, phòng viêm nhiễm phụ khoa, khử mùi hôi, tạo cảm giác mát mẻ, khô thoáng cho vùng kín.

Lau vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài cho cả nam và nữ trước và sau khi quan hệ tình dục, luyện tập thể thao.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Lấy khăn ướt Dr.You ra khỏi túi, lau nhẹ vùng kín (âm hộ) từ trước ra sau và hai bên bên.
- Nên sử dụng sau khi đi tiểu tiện, đại tiện hay khi muốn làm sạch vùng kín: ra mồ hôi, mùi hôi khó chịu, nóng bức....
- Lau các vùng da có mồ hôi: vùng nách, vùng mặt, vùng cổ, xung quanh bên.
- Khăn lau vệ sinh Dr.You chỉ sử dụng 1 lần.

### ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Dùng cho cả nam và nữ.

### BẢO QUẢN

Bảo quản trong túi tiệt trùng/hộp kín. Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

### HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất


Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

### CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ HN - THANH BÌNH

Địa chỉ: C-TT4-4, Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hà Nội, Ngày 20 tháng 06 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

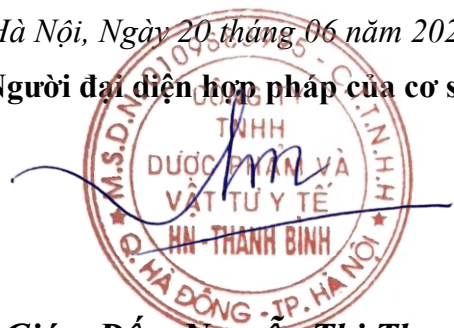

**Giám Đốc: Nguyễn Thị Thanh**