

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: Đai cố định tư thế

Chủng loại/mã sản phẩm: Nẹp gối (đùi gối, căng chân)

1. CẤU TẠO

- Vải cotton hoặc vải mouse dệt kim mềm mại.
- Dây đai, dây bố thun dày có độ đàn hồi cao.
- Thanh hợp kim nhôm, xé dán hỗ trợ định hình.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

- Cố định gãy xương đùi gối, căng chân, rạn xương, bong gân, thoái hóa khớp gối.
- Hỗ trợ cố định sau phẫu thuật quanh vùng gối.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Để bệnh nhân ở tư thế nằm hoặc ngồi.
- Tháo và kiểm tra các dây đai nẹp theo tư thế mở.
- Đeo, lắp nhẹ nhàng, cố định các nấc từ lỏng đến chặt (Giữa, trên, dưới).
- Bệnh nhân luôn phải giữ tư thế cố định, kiểm tra định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

4. KÍCH CỠ/SIZE

Cỡ/Size	S	M	L	XL
	55cm	60cm	65cm	70cm
Số đo vòng gối (cm)	30-33	33-36	36-39	> 39

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đây là sản phẩm hỗ trợ bên ngoài cơ thể nên không có chống chỉ định

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Sử dụng theo chỉ định của bác sĩ

7. BẢO QUẢN

- Để nơi khô ráo, thoáng mát.
- Có thể giặt bằng tay, phơi dưới ánh nắng tự nhiên. Không giặt bằng máy giặt.

8. BẢO HÀNH

- 36 tháng, khi sử dụng sản phẩm có bị lỗi do nhà sản xuất sẽ được đổi sản phẩm khác.


9. HẠN SỬ DỤNG

- 3 năm kể từ ngày sản xuất

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC

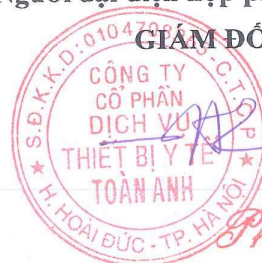

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Hằng