

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIẾT  
BỊ Y TẾ TOÀN ANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Tên sản phẩm: Đai cố định tư thế

Chủng loại/mã sản phẩm: Nẹp cánh tay (Bên trái)

**1. CẤU TẠO**

- Vải cotton hoặc vải mouse dệt kim mềm mại.
- Dây đai, dây bố thun dày có độ đàn hồi cao.
- Thanh hợp kim nhôm, xé dán hỗ trợ định hình.

**2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG**

- Cố định chấn thương vùng khuỷu tay, gãy lồi cầu xương cánh tay, gãy 2 xương cẳng tay.
- Hỗ trợ cố định sau phẫu thuật.

**3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

- Để bệnh nhân ở tư thế ngồi
- Tháo và kiểm tra dây đai theo tư thế mở
- Đeo, lắp nhẹ nhàng, cố định các nấc từ lỏng đến chặt (giữa, trên, dưới)
- Bệnh nhân luôn phải giữ ở tư thế cố định
- Kiểm tra định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

**4. KÍCH CỠ/SIZE**

Cỡ/Size	S	M	L	XL
	55cm	60cm	65cm	70cm
Số đo chiều dài tay (cm)	27-31	31-34	34-39	39-41

**5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

- Đây là sản phẩm hỗ trợ bên ngoài cơ thể nên không có chống chỉ định

**6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG**

- Sử dụng theo chỉ định của bác sĩ

**7. BẢO QUẢN**

- Để nơi khô ráo, thoáng mát.
- Có thể giặt bằng tay, phơi dưới ánh nắng tự nhiên. Không giặt bằng máy giặt.

**8. BẢO HÀNH**

- 36 tháng, khi sử dụng sản phẩm có bị lỗi do nhà sản xuất sẽ được đổi sản phẩm khác.

**9. HẠN SỬ DỤNG**

- 3 năm kể từ ngày sản xuất

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

**GIÁM ĐỐC**



GIÁM ĐỐC

*Phạm Thị Hằng*