

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: Đai cố định tư thế

Chủng loại/mã sản phẩm: Áo cố định vùng lưng (ngắn)

1. CẤU TẠO

- Vải cotton hoặc vải mouse dệt kim mềm mại.
- Dây đai, dây bố thun dày có độ đàn hồi cao.
- Thanh hợp kim nhôm, xé dán hỗ trợ định hình.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

- Cố định chấn thương cột sống lưng và thắt lưng lún, xẹp, gãy các đốt sống.
- Đau lưng cấp và mãn tính, thoái hóa, vôi hóa, gai các đốt sống, thoát vị đĩa đệm, lao, viêm cột sống.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Để bệnh nhân ở tư thế nằm hoặc ngồi.
- Tháo hết dây đai ở tư thế mở, vòng đai áo lưng qua người, thắt các khóa dính từ lỏng đến chặt.
- Bệnh nhân kiểm tra định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

4. KÍCH CỠ/SIZE

Cỡ/Size	S	M	L	XL
Số đo vòng ngực (cm)	< 72	72-80	80-90	90-100

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Đây là sản phẩm hỗ trợ bên ngoài cơ thể nên không có chống chỉ định

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Sử dụng theo chỉ định của bác sĩ

7. BẢO QUẢN

- Để nơi khô ráo, thoáng mát.
- Có thể giặt bằng tay, phơi dưới ánh nắng tự nhiên. Không giặt bằng máy giặt.

8. BẢO HÀNH

- 36 tháng, khi sử dụng sản phẩm có bị lỗi do nhà sản xuất sẽ được đổi sản phẩm khác.

9. HẠN SỬ DỤNG

- 3 năm kể từ ngày sản xuất

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Phạm Chi Hằng