

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Tên sản phẩm: Đai cố định tư thế

Chủng loại/mã sản phẩm: Túi treo tay

**1. CẤU TẠO**

- Vải cotton hoặc vải mouse dệt kim mềm mại.
- Dây đai, dây bố thun dày có độ đàn hồi cao.
- Thanh hợp kim nhôm, xé dán hỗ trợ định hình.

**2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG**

- Túi treo tay có chức năng giữ ổn định theo tư thế gấp khuỷu tay vuông góc hoặc chéch, giữ ổn định tốt cho những chấn thương, gãy xương, sai khớp cánh tay, cẳng tay.

**3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

- Lấy túi treo tay ra khỏi túi.
- Tháo dây treo tay ra, vòng dây treo tay qua sau vai và cổ ra trước ngực, lồng dây qua khuỷu tay và dính lại.
- Đặt khuỷu tay, cẳng tay vuông góc theo chiều dài của túi.

**4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

- Đây là sản phẩm hỗ trợ bên ngoài cơ thể nên không có chống chỉ định

**5. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG**

- Sử dụng theo chỉ định của bác sĩ

**6. BẢO QUẢN**

- Để nơi khô ráo, thoáng mát.
- Có thể giặt bằng tay, phơi dưới ánh nắng tự nhiên. Không giặt bằng máy giặt.

**7. BẢO HÀNH**

- 36 tháng, khi sử dụng sản phẩm có bị lỗi do nhà sản xuất sẽ được đổi sản phẩm khác.

**8. HẠN SỬ DỤNG**

- 3 năm kể từ ngày sản xuất

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

**GIÁM ĐỐC**



GIÁM ĐỐC

*Phạm Thị Hằng*