

# Diluent

BCC-3D Diluent

DIRUI®

**【Tên sản phẩm】**Diluent

**【Model】** BCC 3D Diluent

**【Dung tích】** 20L

**【Mục đích sử dụng】** Dùng để pha loãng mẫu

**【Nguyên tắc kiểm tra】** Nó phải có áp suất xâm nhập và tốc độ dẫn điện thích hợp. Giữ hoàn toàn khối lượng tế bào ban đầu. Đảm bảo xung khớp với khối lượng tế bào

**【Nguyên liệu】** Sodium sulfate, potassium chloride, sodium dihydrogen phosphate

**【Điều kiện lưu trữ và thời hạn sử dụng】**

Được bảo quản ở nhiệt độ 2 °C~30 °C, niêm phong và bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời, và thời hạn sử dụng đề cập đến nhãn.

**【Dụng cụ đi kèm】** Máy phân tích huyết học series BF

**【Yêu cầu mẫu】** EDTA nên được sử dụng để chống đông máu (EDTA-2K, EDTA-3K or EDTA-2Na).

**【Cách sử dụng】** Vui lòng tham khảo hướng dẫn cá dụng cụ.

**【Chỉ số hiệu suất】** (25±1) °C, pH is 7.70±0.20

**【Lưu ý】**

1. Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro.
2. Nó phải được bảo quản ở 2°C~30°C. Không đóng băng thuốc thử.
3. Tránh tiếp xúc với da, quần áo và mắt. Rửa bằng nhiều nước nếu nó tiếp xúc với da hoặc quần áo. Rửa bằng nhiều nước nếu nó văng vào mắt và nên đi khám. Nếu vô tình nuốt phải, hãy gọi bác sĩ ngay lập tức
4. Mẫu, chất thải có khả năng lây nhiễm, người thực hiện phải tuân thủ các quy định của phòng thí nghiệm. Xử lý chất thải theo quy định của địa phương đối với chất thải y tế, chất thải lây nhiễm và chất thải công nghiệp.

**【Tham chiếu】**

Lin Faquan, Huang Mincheng, etc. Development and Application of SYSMEX SF-3000 blood analyzer diluents[J]. Guangxi Medical, 2006 (06): 1186-1187.

**【Symbol Explanation】**

 Please read instruction	 Storage temperature	 Keep In Dark Places	 Manufacturer
 Lot No	 Expiry	 Catalogue number	 In vitro Diagnostic Reagent
 European In Vitro Diagnostic Medical Device Directive 98/79/EC(IVDD)		 Authorised Representative	

**【Manual Approved and Modified Date】** 02/2019



**DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD.**

95 Yunhe Street, New & High Tech.  
Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China  
Tel: +86 431 85100409 Fax: +86 431 85172581  
E-mail: dirui@dirui.com.cn http://www.dirui.com.cn



IVD

EC REP

EMERGO EUROPE Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague The Netherlands



GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Tuấn