

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÚI CHO ĂN

1. MÔ TẢ :

- Túi cho ăn làm từ nhựa PVC gồm dây dẫn và túi đựng thức ăn có vạch chia tỉ lệ rõ ràng.
- Túi có nắp đậy và vòng treo chắc chắn
- Dây dẫn có bầu nhỏ giọt, khóa điều chỉnh và đầu ống cắm
- Đóng gói: theo quy cách nhà sản xuất
- Sản phẩm tiệt trùng 100%
- Thời hạn sử dụng 5 năm
- Sản phẩm vô trùng, chỉ dùng một lần
- Loại đơn : có 1 túi, loại đôi : có 2 túi
- Chủng loại/size : 500 ml, 1000 ml, 1200 ml

2. MỤC ĐÍCH/CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG :

- Dùng để chứa và truyền thức ăn vào cơ thể cho bệnh nhân

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không có

4. TÁC DỤNG BẤT LỢI CÓ THỂ XẢY RA :

- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không để sản phẩm ở nơi có độ ẩm, nhiệt độ cao và tránh để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. bảo quản nơi khô ráo thoáng mát
- Sản phẩm tiệt trùng, sử dụng một lần
- Kiểm tra bao bì sản phẩm phải còn nguyên vẹn trước khi sử dụng, sản phẩm đã được khử trùng. Và phải sử dụng ngay sau khi xé bao bì.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

- Rửa tay sát khuẩn
- Lấy sản phẩm khỏi bao vô trùng
- Mở nắp túi và cho thức ăn vào sau đó đóng nắp túi lại
- Treo túi lên
- Mở van điều khiển và điều chỉnh tốc độ chảy phù hợp theo đường ống dẫn vào bệnh nhân.
- không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, không tái sử dụng sản phẩm.
- Cần đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Cần chú ý đến tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn

6. CẢNH BÁO THẬN TRỌNG:

- không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, không tái sử dụng sản phẩm.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cát Triều



- Cần đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Cần chú ý đến tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn

7. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHUNG:

- Đảm bảo điều kiện vô trùng cần thiết khi thao tác với sản phẩm
- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã qua đào tạo

8. HỦY BỎ:

- Sau khi sử dụng thiết bị nên xử lý theo quy định xử lý rác thải y tế theo quy định hiện hành của địa phương

9. VẬN CHUYỂN:

- sản phẩm được vận chuyển bằng phương thức vận chuyển tiêu chuẩn dành cho thiết bị y tế.

10. BẢO QUẢN:

- bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

11. THỜI HẠN SỬ DỤNG: 5 năm từ ngày sản xuất

