

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

- Tháo nắp bảo vệ vòi phun
- Xịt thử bình xịt để đảm bảo vòi xịt được liên tục
- Đưa vòi xịt cẩn thận vào cửa mũi, hơi nghiêng đầu về phía trước
- Nhấn và giữ vòi xịt liên tục trong vòng 2-3 giây
- Lặp lại thao tác với bên mũi còn lại
- Để dung dịch dư chảy ra ngoài và hỉ mũi, lau khô mũi bằng khăn sạch
- Vệ sinh vòi xịt bằng nước sau mỗi lần sử dụng
- Sản phẩm an toàn khi sử dụng ở mọi tư thế và hướng. Với trẻ sơ sinh, người cao tuổi, nằm liệt giường hay hạn chế vận động, nên sử dụng sản phẩm ở tư thế nằm nghiêng và đầu hơi nâng cao.

Liều dùng: Nhỏ vào mỗi lỗ mũi, tốt nhất là trước mỗi bữa ăn, 1 đến 3 lần một ngày tùy theo nhu cầu.

Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, lửa và nhiệt độ cao

- Lưu ý: Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn.

Đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiên Sỹ