

Công ty TNHH Y Tế Mindray Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 2, Tầng 4, tòa nhà Broadway B, 102 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 01 tháng 07 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA CHẤT ESR

Cách sử dụng như sau:

1/Đề lọ hoá chất ở nhiệt độ thường

2/ Mở lọ nước rửa

3/Sử dụng pipette 1000ul để hút nước rửa cho vào bình chứa nước cất

4/ Cắm ống hút vào để sử dụng rửa cuvette sau khi đo mẫu xong

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG MÁY VÀ LÀM XÉT NGHIỆM

1. Khi bật, tắt máy: - Khi mất điện cần phải tắt máy ngay, đến khi bắt đầu có điện nên để nguồn điện ổn định từ 3 đến 5 phút ta mới bật máy. Nên dùng ổn áp để có điện áp ổn định.
- Chú ý không bật máy luôn sau khi vừa tắt máy. Sau ít nhất 30 giây để máy ổn định mới bật. Nếu bật, tắt đột ngột có thể gây cháy cầu chì và sẽ dẫn đến hỏng các bộ phận khác của máy.

2. Cách bảo quản máy:

- Tắt nguồn máy và vệ sinh vỏ máy bằng vải mềm.

- Nên đặt máy ở nơi khô thoáng, không bị ẩm. Tốt nhất là có máy hút ẩm hoặc điều hoà. - Hàng ngày dù không tiến hành làm xét nghiệm cũng nên bật máy 30 phút để tránh cho máy bị ẩm, mốc.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám đốc

Qiang Xu