

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên trang thiết bị y tế: **DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI**

Chủng loại/mã sản phẩm: **BẢO ÂM PT/06**

1. THÀNH PHẦN

Chiết xuất từ: Cam thảo, Kim ngân, Long não, Sâm đại hành, Vô hoan tử, Phụ liệu khác vừa đủ.

2. CÔNG DỤNG

- Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa viêm nhiễm, lở loét phụ khoa, lộ tuyến, khí hư, bạch đới, nấm, ngứa.
- Loại bỏ chất nhầy, dịch bản, mùi hôi phụ khoa. Dem lại cảm giác khô thoáng, sạch sẽ, dễ chịu hàng ngày hoặc trong những ngày hành kinh.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng:

2 - 3 lần/ngày vào buổi sáng, trưa và tối. Mở khoá đầu bơm, đưa từ từ ống bơm vào tới vị trí, nhấn đầu bơm bơm hết dung dịch. Để khô tự nhiên hoặc rửa lại bằng nước sạch sau 4 giờ.

Đối tượng sử dụng:

Người bị viêm nhiễm, lở loét, nấm, ngứa phụ khoa, lộ tuyến, âm đạo, khí hư, bạch đới. Giữ gìn sạch sẽ những ngày hành kinh.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng vào những vết thương đang chảy máu, không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

5. BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

6. HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, Ngày 01 tháng 07 năm 2022

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Đỗ Phương Thảo