


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MŨI MÀI XƯƠNG

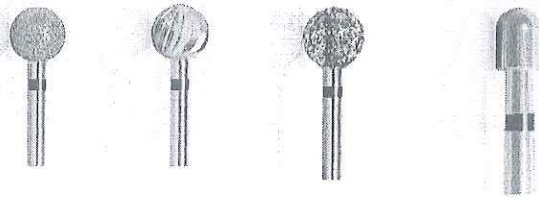

CÔNG TY TNHH TBYT TRÀNG THỊ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Diệu Linh

Hà Nội – 2022



I. THÔNG TIN CHUNG

Mục đích sử dụng, chỉ định:

Mũi mài xương được thiết kế để sử dụng trên xương cho phẫu thuật thần kinh, cột sống, tai mũi họng

Chống chỉ định:


Mũi mài xương không được thiết kế để sử dụng trên thần kinh trung ương (não và tủy sống).

Tác dụng bất lợi:

Mũi mài xương có thể gây bỏng cho bệnh nhân hoặc người sử dụng

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

2.1 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH

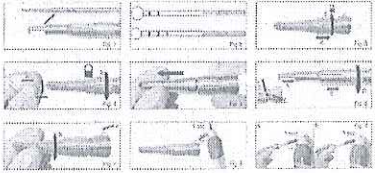A	Chuẩn bị trước mổ (hữu trùng)	
	- Chuẩn bị các mũi mài xương cần thiết	
B	Lắp mũi khoan mài trên bàn tít (vô trùng)	
	<ul style="list-style-type: none">- Mở khóa chụp bằng cách xoay chuôi chụp ngược kim đồng hồ- Lắp mũi mài xương vào chụp bằng cách ấn hết cỡ- Xoay chuôi chụp chiều kim đồng hồ để đóng khóa- Có thể rút mũi mài ra 1-2 khác nếu muốn phần mũi thò ra dài hơn- Thay mũi: xoay chuôi chụp mở khóa -> rút mũi cũ ra -> cắm mũi mới vào, xoay chuôi chụp đóng khóa	
C	Tiến hành phẫu thuật (vô trùng)	
	<ul style="list-style-type: none">- Dẫn lấy bàn đạp để kích hoạt motor- Thay đổi mũi mài trên bàn tít trong mổ theo nhu cầu sử dụng	

2.2 HƯỚNG DẪN LAU RỬA, TIỆT TRÙNG, BẢO QUẢN, BẢO TRÌ

A	TIỆT TRÙNG	
	<ul style="list-style-type: none">- Các mũi mài xương dùng một lần đều đã được tiệt trùng sẵn- Các mũi mài xương dùng nhiều lần chưa tiệt trùng, có thể hấp ở 134 độ C, 2.2 bar.	

B	BẢO QUẢN	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bảo quản ở nhiệt độ phòng trong môi trường khô ráo, tránh ánh sáng. - Không sử dụng khi mũi mài xương hết hạn sử dụng 	

III. CẢNH BÁO, PHÒNG NGỪA

- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi bác sĩ được đào tạo sử dụng cho phẫu thuật. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Mũi mài xương đóng gói tiệt trùng không sử dụng nếu bao bì có dấu hiệu bị làm hư hại.
- Mũi mài xương đóng gói tiệt trùng sử dụng một lần, không tái sử dụng, vứt bỏ ngay sau khi sử dụng.
- Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng, xem có bị hư hại, hỏng, dấu hiệu bất thường không.
- Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng mũi mài xương được vô trùng và trong tình trạng kỹ thuật hoàn hảo. Không sử dụng lại mũi mài xương đã bị hư hỏng.
- Không sử dụng các mũi mài xương để làm việc trên kim loại (ví dụ: thiết bị cấy ghép) và không để chúng tiếp xúc với kim loại trong quá trình sử dụng vì điều này có thể gây ra các vết nứt trên đầu mũi mài.
- Vì lý do an toàn, luôn phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép. Vượt quá tốc độ cho phép có xu hướng tạo ra rung động có thể dẫn đến gãy mũi mài và có nguy cơ làm tổn thương cho những người xung quanh.

