

A-silicone for Gingival Mask



An addition silicone recommended for precise reproduction of gingival morphology.

Indication

Specially designed for gingival reproduction of implant prosthetic models.

Characteristic

- ① 45 Shore A hardness
- ② Setting time: 8-10 min
- ③ Mixing ratio 1:1
- ④ Total working time : more than 1 min

Advantage

- ① Good linear dimensional stability
- ② Excellent esthetic performance
- ③ Ease of use

Partial Model Silicone



This product is used for the full or partial model duplication in the dental laboratory.

C-silicone for Laboratory

Characteristic

- ① Two hardness versions available:
90 Shore A hardness / 85 Shore A hardness
- ② Mixing time: 30s
- ③ Total working time: 1-2 min

Advantage

- ① Accurate reproduction of details
- ② Stable and low deformation rate



A-silicone for Laboratory

Characteristic

- ① Soft and easy-handling texture
- ② High and popular final hardness Shore A 90
- ③ Resistant to high temperature up to 200°C

Advantage

- ① Easy mixing ratio 1:1
- ② High fitting and outcoming precision
- ③ No irritants and nasty smell

Tên TTBYT: Vật liệu lấy dấu răng

Chủng loại:

Duplication Silicone Material

Mã sản phẩm

A-Silicone for Gingival Mask, Partial Model Silicone

Mô tả sản phẩm:

- Dạng polymere tổng hợp, được sử dụng trong labo nha khoa
- Thao tác đơn giản, dễ làm

Chỉ định:

- Làm nướu giả trên mẫu hàm thạch cao, sao chép mẫu hàm thạch cao

Thao tác:

1. Làm khô mẫu hàm thạch cao
2. Trộn theo tỉ lệ 1:1

3. Thời gian trộn: 30 giây
4. Phủ 1 lớp vừa đủ lên mẫu hàm
5. Thời gian đông: 1 - 2 phút
6. Khi vật liệu đông hoàn toàn, lấy ra làm sạch.

Lưu ý:

Xem hạn sử dụng, nếu quá hạn thì không sử dụng
Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra thì báo ngay với nhà phân phối tại địa phương

Bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ từ 5 - 25oC
Không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp
Sử dụng vật liệu ở nhiệt độ phòng
Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất

Đóng gói:

Tuýp 50ml hoặc bình 5kg

Cảnh báo:

Nhà sản xuất cam kết không có tác dụng phụ
Sử dụng vật liệu đúng mục đích
Nếu sản phẩm bị lỗi, nhà phân phối sẽ đổi sản phẩm mới

Giới hạn trách nhiệm:

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho sự hư hỏng của sản phẩm trong quá trình vận chuyển, phân phối

Các ký hiệu trên nhãn sản phẩm:

Ngày hết hạn



lưu ý



số lô sản xuất



Nhiệt độ



tránh ánh nắng



giữ khô ráo



Hướng dẫn sử dụng



nhà sản xuất



nước sản xuất



Dụng cụ y tế



nhận diện dụng cụ



Đại diện ủy quyền tại châu Âu

Nhà sản xuất:

Công ty Shandong Huge Dental Material
Số 68 đường Shanhai, Quận Dongang, Thành phố Rizhao, Tỉnh Shangdong, 276800,
Trung Quốc