

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA

1. Đặt bệnh nhân vào vị trí thích hợp để đặt ống nội khí quản
2. Nhìn vào miệng bệnh nhân, chèn dụng cụ đặt ống nội khí quản vào bên phải miệng bệnh nhân.
3. Gạt lưỡi của bệnh nhân sang trái. Di chuyển thiết bị đến vị trí trung tâm.
4. Đẩy lưỡi đèn vào hốc nhỏ trong khí quản. Di chuyển đầu lưỡi đèn đến thung lũng nắp thanh môn.
5. Nhìn vào ống thanh quản trên màn hình. Di chuyển thiết bị lên xuống để lật nắp thanh môn bộc lộ 2 dây thanh âm.
6. Đưa ống nội khí quản đi vào qua 2 dây thanh âm, trong quá trình đưa ống vào, nhìn màn hình để chắc chắn rằng vị trí ống đã thích hợp.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Chỉ họ tên đầy đủ, chức danh)

Đã nhận đóng dấu hoặc chữ ký



NGUYỄN HỒNG ĐỨC