

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GEL DÙNG NGOÀI

(Chủng loại/ Mã sản phẩm: Dr.AROMA/01)

## 1. Thành phần:

Alpha tocopherol, Sodium laureth sulfat (Texapon n70t), Coca Amidopropyl Betain (CAB), Acid Lactic, Piper betle Extract ( Dịch chiết trâu không ), Green Tea Extract ( Dịch chiết trà xanh ), Chamomile extract Chiết xuất Cúc la mã, Tinh dầu bạc hà, Nano Sliver, Glycerin (Glycerol), Propylen Glycol, PEG120-Methy Glucose Dioleate (DOE), Sodium Chloride, Ethanol, Poly sorbate, Aqua purificata, Hương liệu vừa đủ.

## 2. Mục đích sử dụng :

- Giúp làm sạch cơ quan sinh dục ngoài ở cả nam và nữ khỏi các tác nhân gây viêm nhiễm, nấm ngứa.
- Giảm tình trạng khô rát, làm mềm da, Giúp làm hồng và se khít, không gây kích ứng trên da.
- Duy trì độ ẩm và pH sinh lý cần thiết trên da, tạo cảm giác thoáng mát, mang lại hương thơm dễ chịu sau khi sử dụng.

## 3. Cách dùng:

- làm ướt vùng kín, sau đó lấy 2 đến 3 ml gel ( tương đương với 1 đến 2 lần nhấn xịt ) vào lòng bàn tay, thoa và rửa nhẹ nhàng vùng kín, sau đó rửa lại bằng nước sạch.
- Dùng vệ sinh hằng ngày hoặc đang trong quá trình điều trị các bệnh phụ khoa: 1-2 lần/ngày.

## Chống chỉ định :

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

## Thận trọng :

Đề xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

## Bảo quản:

Nơi khô, tránh ánh sáng, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý

Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý

Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC  
Vũ Duy Công