

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Model: Constant 1400

### 1. Chuẩn bị trước khi hoạt động

- Mở nắp và đổ nước vào 2 cột đựng nước, đổ tới vạch số 10, hai cột này để chỉ thị áp suất hút của máy. Khi đổ nước vào 1 bình, bình còn lại cũng sẽ có mức nước như bình kia (2 bình thông nhau)
- Lắp ống thông hơi giữa bình chứa nước và bình hút dịch.

### 2. Hoạt động

- Cắm điện, bật công tắc
- Gập ống hút tới người bệnh nhân, điều chỉnh núm xoay để điều chỉnh lưu lượng hút.
- Điều chỉnh áp suất hút: Gập ống hút tới người bệnh nhân, ấn nút điều chỉnh áp suất hút. Khi đó mực nước ở hai cột nước sẽ thay đổi, sẽ có sự chênh lệch mức nước ở hai cột, nó sẽ dừng lại ở áp suất mong muốn.
- Chỉ ấn nút điều chỉnh áp suất khi muốn giảm áp suất hút hay khi điều chỉnh mực nước ở hai cột nước.
- Thay đổi thanh điều chỉnh áp suất lên xuống để được áp suất hút mong muốn (áp suất dưới 10cmH<sub>2</sub>O).
- Sau đó bắt đầu hút, khi bình chứa đầy thì ngắt máy để đổ dịch ra ngoài.
- Khi hút xong, cho ống hút vào chậu nước để máy hút nước rửa ống hút trước khi tắt máy.

### 3. Tiệt trùng và vệ sinh

*\* Những chú ý khi tiệt trùng bằng hóa chất:*

- Lau chùi vết nhơ trước khi đem đi tiệt trùng
- Không được tiệt trùng chung với các dụng cụ khác.
- Theo dõi quá trình tiệt trùng
- Có thể sử dụng khí oxi etylen để tiệt trùng dụng cụ.
- Cận thận khi chạm vào vật dụng hay hít hơi tiệt trùng. Sau khi tiệt trùng xong thì rửa sạch và sấy khô.
- Có thể hấp tiệt trùng.